

製品仕様

【在宅セット】品番:CA-2500



価格 **¥75,000**円+税 TAISコード:01594-000001
 ・信号受信ボックス(長さ141×幅81×厚さ32mm) ・AC電源(5V用)
 ・メロディと点滅光でお知らせ
 ・メロディ音量3段階調節(無音・音小・音大)

※プレートセンサー発信器(施設用・在宅用)(長さ440×幅50×厚さ16mm) ※2台まで増設可能

【施設セット】品番:CA-2501



価格 **¥75,000**円+税
 ・信号受信ボックス(長さ111×幅75×厚さ25mm)
 ・AC電源(5V用)
 ・接続ケーブル ※分岐ボックスが別途必要です(別売)

【仕様】 ●使用温度範囲:0~+40℃ ●無線到達距離:40m(障害物なし) ●発報回数:3,000回(ボタン電池CR2032) ●電池残量警告付 ●日常生活防水

より早くベッドの離床を検知!

無線でらくらく 認知症徘徊感知機器

あんしんプレートセンサー

機器構成例



【基本タイプ】施設/既設ナースコールに接続



【在宅タイプ】



【通報システム発展タイプ】



様々なパターンにて構成が可能ですのでお問い合わせください。



本 社
 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-7-1
 Tel.048-475-3662 Fax.048-475-3712
 E-mail:lundal-corp3662@lundal.co.jp

◎お問い合わせ・ご用命は下記までお申し付けください。

製造部/岩手営業所/青森サテライト/八戸サテライト/秋田サテライト/仙台営業所
 埼玉営業所/八王子サテライト/東京営業所/千葉サテライト/横浜営業所/大阪営業所
 名古屋サテライト/兵庫サテライト/岡山サテライト/おせわ〜く北陸(業務提携先)北研エンジニアリング(株)

インターネットホームページアドレス <http://www.lundal.co.jp>

◎予告なしに商品の価格を変更する場合がございますので予めご了承ください。◎カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

開発製造元:株式会社アートテクノロジー


無線でらくらく

認知症徘徊感知機器

あんしんプレートセンサー

この様な時に!

- ベッドから立ち上がる前に駆けつけたい!
- コードに引っ掛けて危ない、断線修理が頻繁!
- ベッドが揺れるだけで誤報が発生してしまう!
- 設置・移動のたびに再設定ですごく面倒!

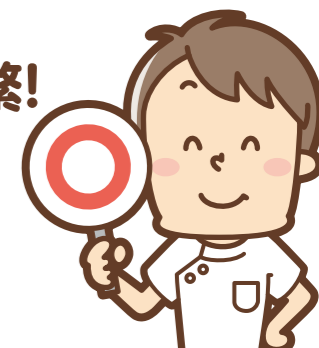

上記のお悩みを解決できる「あんしんプレートセンサー」です!

特徴1 断線トラブルの心配がありません。

無線タイプで配線がない為、断線トラブルの心配がありません。
清掃やシーツ交換、清拭等の介護作業も従来通り行え、手間が増える事はありません。



特徴4 感知タイミングの調整が可能です。

ほとんどの場合、センサーをボトム面端に設置すれば想定されたタイミングで感知できますが、特異な利用者の場合、感知が遅くなったり早すぎて誤報の原因になります。その時は、センサーの位置を1~2cm動かす事で解決できます。



特徴2 早めに感知・お知らせ!

移乗側のボトム面の端に設置する事により、利用者の重心がベッドサイドに寄った時点(端座位姿勢になる前)に感知し、お知らせする事ができます。
利用者の転倒・徘徊予防につながります。



特徴5 利用者から見えません!

薄いセンサー(厚16mm)の為マットの下に設置する事で利用者から見え、不快に思う事はありません。
悪戯やセンサーを避ける心配はありません。
寝心地にも影響がありません。



特徴3 誤報に強い仕組み!

センサーをボトム面の端に設置する事により、センサーに脚が掛かった程度では感知しません。
よって、利用者の寝返りで誤報が発生するというお悩みから解放されます。



特徴6 シンプル設定&コンパクト設計!

特別な設定や調整が必要なく、簡単に使用できます。
又、シンプルな構造の為、故障、損傷にも強い。
ボタン電池で3,000回以上の発報が可能、メンテナンスも簡単。(電池交換サインもあります)
又、コンパクトサイズで、移動も楽に行えます。



在宅用
・メロディと点滅光でお知らせ
・メロディ音量3段階調節(無音・音小・音大)

施設用
・ナースコールに接続