

## 8. 停電・故障時の取り扱いについて

- 停電やベッドの故障時に、背ボトムが上がったままの状態を平らにすることができます。

### ■ 背下げのしかた

#### ⚠ 注意



- ・ 駆動部の連結部を外すことにより行います。ベッドをはじめの状態に復旧させるものではありません。手元スイッチでの操作は、停電やベッドの故障が回復するまで使用できません。
- ・ 作業は必ず2人以上で行ってください。

- ① コンセントからベッドの電源プラグを抜きます。
- ② 寝具やマットレスを降ろします。
- ③ 背ボトムと背トルクチューブを押さえてください。
- ④ 背ボトム駆動部の連結を解除します。

#### ⚠ 注意

連結部を解除すると、モーターにより駆動していた部分が自由な状態となり平らな状態へ戻ります。手などをはさまないように注意してください。

ボトムを起こすと図のような連結部があります。連結部を固定しているスナップピンを抜き、連結ピンを取り外します。

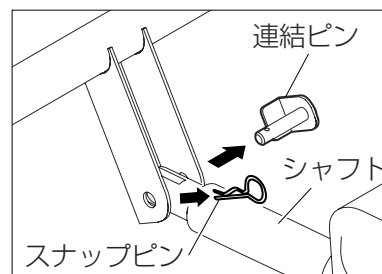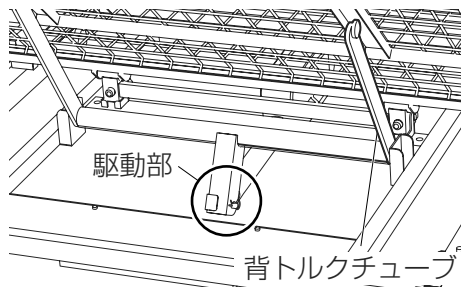


## ⚠ 注意

- ・ 外した連結ピン, およびスナップピンは復帰の際に使用します。紛失しないよう、保管してください
- ・ この作業を行った時は、復帰作業を行って元の状態に戻すまで電源プラグはコンセントから抜いたままにしてください。

⑤ 駆動部を平らな状態にします。

## ⚠ 警告

モーターの軸を回転させると、故障や人身事故を招く恐れがあります。モーターを取り外した場合は、絶対に軸を回転させないで下さい。

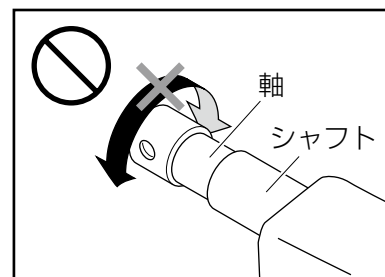

## ⚠ 注意

停電やベッドの故障が回復したら、駆動部と連結部を元に戻してください。

## ■ 戻しかた

## ⚠ 注意

作業は必ず2人以上で行ってください。

- ① 寝具やマットレスを降ろします。
- ② 背ボトムと背トルクチューブを押さえてください。
- ③ 背ボトム駆動部を連結します。
- ④ ベッドの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ⑤ 手元スイッチを操作して背ボトムを一番下まで下げます。