


介護ベッドを安全にご使用いただくために

サイドレール等で重大事故が起きています!

取扱説明書をよく読み、注意して正しくお使い下さい。

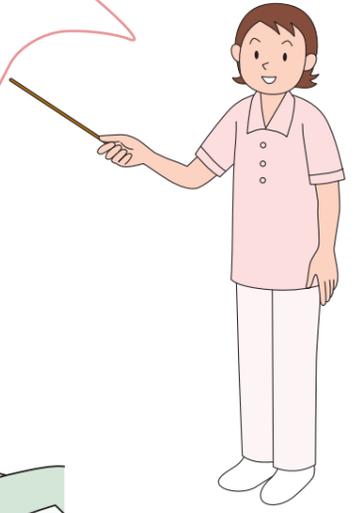

多発する事故事例



腕を入れて背上げすると骨折の危険性!



マットとレールの間に注意




レールとレール、レールとボードの間に注意



衣服の引っ掛かりに注意





ベッドグリップの首振りが固定されておらず転倒

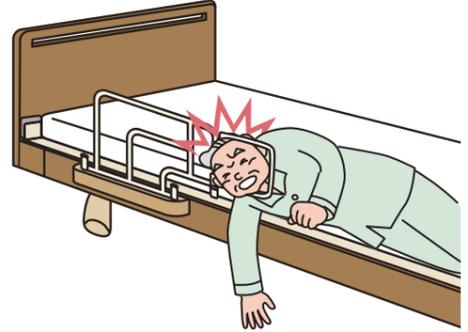

頭が入る空間に注意


事故につながる危険な事例

ベッドの高さが調整されていない

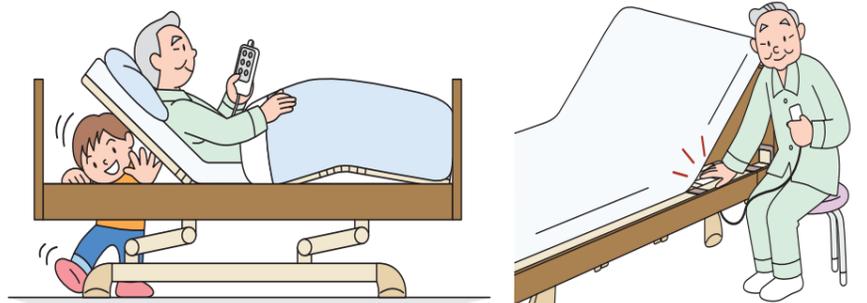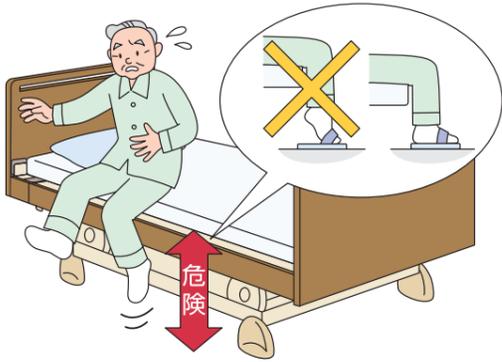

体をベッドの中に入れる

電源プラグ、コード、スイッチは大丈夫

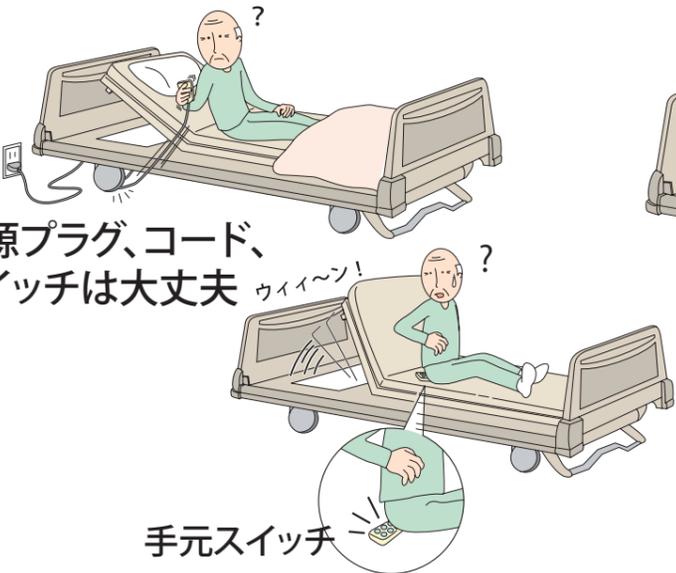

手元スイッチ

レールやボードをまたいで降りる



危険物を置く



医療・介護ベッド安全普及協議会

Safety Promotion Council for Medical and Home Care Bed

東京都江東区東砂2-14-5 TEL 03-3648-5510

ホームページ

<http://www.bed-anzen.org>

協議会会員名簿(あいうえお順)

シーホネンス株式会社

パラマウントベッド株式会社

フランスベッド株式会社

株式会社プラッツ

株式会社モルテン

株式会社ランダルコーポレーション

株式会社 東機貿

<http://www.seahonence.co.jp/>

<http://www.paramount.co.jp/>

<http://www.francebed.co.jp/>

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

<http://www.molten.co.jp/>

<http://www.lundal.info/>

<http://www.tokibo.co.jp/>