

◆
 日常のお手入れおよび点検

◎水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを落としたり乾いた布でから拭きしてください。

警告

ネジ類のゆるみの点検

サイドフレームのノブボルトなど、取り付けネジがゆるんでいないか時々点検してください。ゆるんでいるネジは締めるようにしてください。

注意

シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

◆
 アフターサービスについて

■
 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
 日付の記入がない場合は、ベッドお買い上げの領収書を保証書と一緒に保管してください。

■
 修理を依頼されるとき

- ◎ 連絡していただきたい内容

 - 品名、品番、製造識別表示ラベルの番号
 - お買い上げ日
 - 故障、または異常の内容（できるだけ詳しく）
 - お名前、ご住所、および電話番号
- ◎ 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。


■
 製品の最低保有年数は

弊社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後、5年としております。

株式会社ランダルコーポレーション 営業所一覧			
本社工場	〒354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井421	TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430
札幌営業所	〒065-0042	北海道札幌市東区本町2条3-10-1-142	TEL.011-787-5100 FAX.011-780-5117
岩手営業所	〒020-0846	岩手県盛岡市流通センター北1-2-20	TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631
秋田デポ	〒010-0941	秋田県秋田市川尻町字大川反170-81	TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862
青森営業所	〒030-0921	青森県青森市原別8-9-1	TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534
八戸営業所	〒039-1103	青森県八戸市長苗代1-5-8	TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213
仙台営業所	〒984-0015	宮城県仙台市若林区卸町4-8-10	TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287
埼玉営業所	〒354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井421	TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134
群馬営業所	〒370-0105	群馬県伊勢崎市境伊与久384	TEL.049-274-3132 FAX.0270-61-9048
八王子営業所	〒193-0824	東京都八王子市長房町22-26	TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167
東京営業所	〒120-0005	東京都足立区綾瀬1-20-18	TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081
千葉営業所	〒262-0022	千葉県千葉市花見川区南花園2-9-21RTサンライト101号室	TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754
横浜営業所	〒240-0003	神奈川県横浜市保土ヶ谷区天王町1-16-4	TEL.045-459-5815 FAX.045-459-5814
湘南営業所	〒252-0824	神奈川県藤沢市打戻1861-5	TEL.0466-90-5136 FAX.0466-90-5836
大阪営業所	〒578-0981	大阪府東大阪市島之内2-14-27	TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
名古屋営業所	〒485-0059	愛知県小牧市小木東1-12	TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830
兵庫営業所	〒651-2132	兵庫県神戸市西区森友1-157	TEL.078-995-5982 FAX.078-995-5984
岡山営業所	〒700-0975	岡山県岡山市北区今8-3-35	TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066
福岡営業所	〒818-0063	福岡県筑紫野市桜台2-22-17フォーサイト桜台Social House101号室	TEL.092-924-8586 FAX.092-924-8587
介護ショップランダル	〒202-0013	東京都西東京市中町4-2-26	TEL.042-423-2001 FAX.042-423-6770

株式会社ランダルコーポレーション本社 〒351-0034埼玉県朝霞市西原1-7-1
 代表:TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712 特販部:TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

取扱説明書
 AS-1180、AS-1180-1
 ロングサイドレール

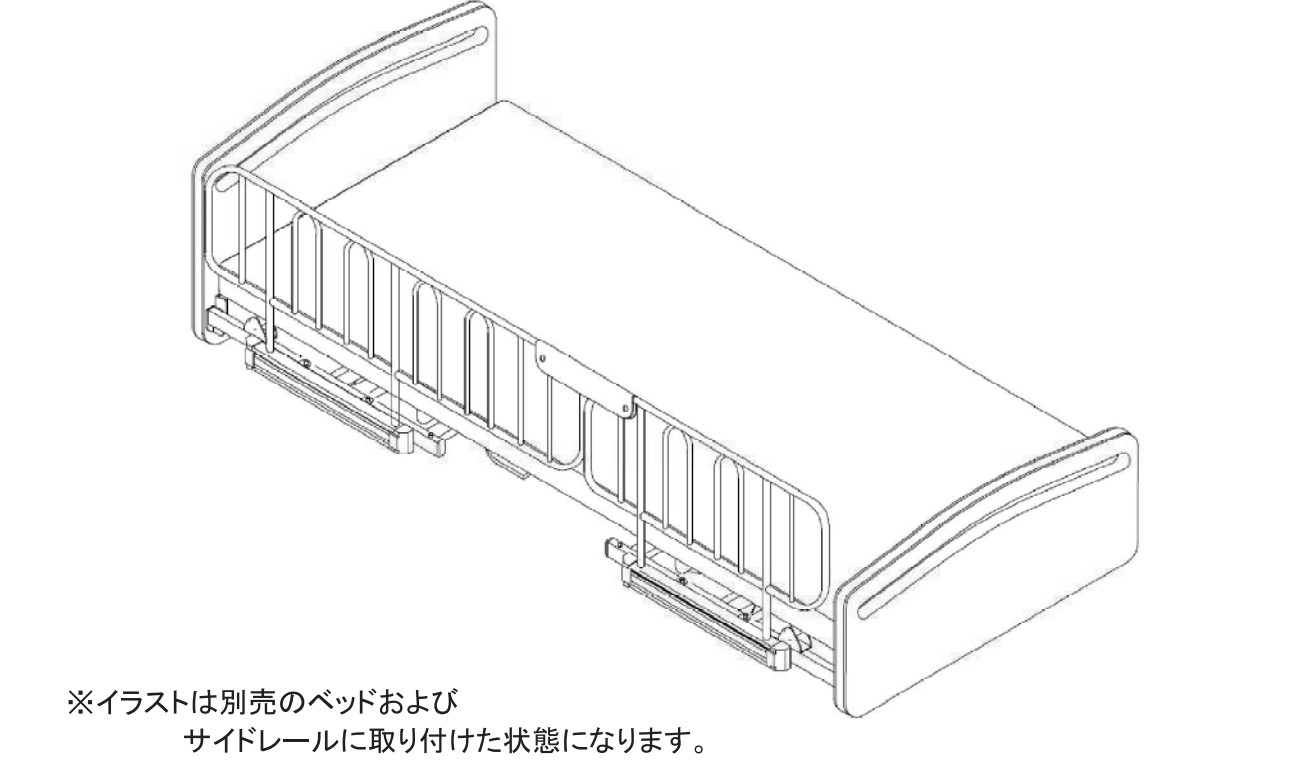

※イラストは別売のベッドおよび
 サイドレールに取り付けた状態になります。

◆
 各部の名称

【警告ラベル】

警告

頭、腕や足をサイドレールから出したまま背上げ・膝上げ操作をしないでください。

●サイドレールをご使用して頂く上で、注意して頂きたい項目をラベルにして貼ってあります。はがしたりしないでください。

●ラベルが剥がれたり、傷ついてしまった場合はお近くの販売店に連絡してください。

【付属品】

連結ピン

スナップピン

連結金具

本書

安全にご使用いただくために

取り扱いを誤ると重大事故につながるおそれがありますので、ご使用前に本書を必ずよくお読みの上、正しくご使用ください。



警告

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。

■当社製以外のベッドに取り付けて使用しないでください。

- 破損したり、思わぬ事故によりケガをする可能性があります。

■サイドレール使用時のベッドからの転落に注意してください。

■ベッドを操作する際に、サイドレールより外に頭や手足などを出さないでください。

- 周辺の物との間またはサイドレールのすき間に挟まれ、生命に関わる重大な事故が発生する可能性があります。




■サイドレールとのすき間に十分注意してください。

- 差し込みサイドレールと組み合わせてご使用する場合、サイドレールとのすき間に頭や首をはさまれるおそれがあります。



■ベッドのヘッドボードとのすき間に十分注意してください。

- 介助バーとヘッドボードとのすき間に頭や首をはさまれるおそれがあります。

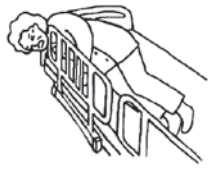

■ベッド上で予測できない行動をとる可能性がある方や自分で危険な状態から回避できない方には十分注意してください。

- すき間をクッション材や毛布で埋めるなど事故防止のための工夫をお願い致します。

■サイドレールに腰を掛けたり・もたれかかったり、つかまり立ちなどはしないでください。

- 強度的に適しておらずサイドレールが破損したり、サイドレールが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。
- サイドレールは寝ている方の身体の転落防止・寝具のすべり止めとして使用します。つかまり立ちをする場合は介助バーをご使用下さい。



■本書に記載されている手順以外に、分解や改造を絶対に行わないでください。

- サイドレールが破損したり、サイドレールが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。



注意

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ベッド本体を移動する際に、サイドレールを持って移動させないでください。

- サイドレールが破損したり、サイドレールが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。

■指定以外の製品とは組合せしないでください。


- 介助バーをベッドに取り付ける際に、必ず適合品を使用してください。ベッドや介助バーなどに負担をかけ、ケガをしたり故障するおそれがあります。適合品については、販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。

■近くにストーブ等の熱器具を置かないで下さい。

- 火災や火傷、変形・変質の原因になります。


取り付け方法および使用方法

- ロングサイドレールおよびさしこみサイドレール(AS-078、AS-378)を右図のようにベッドの固定型サイドフレームの穴へしっかりと差し込んで使用してください。

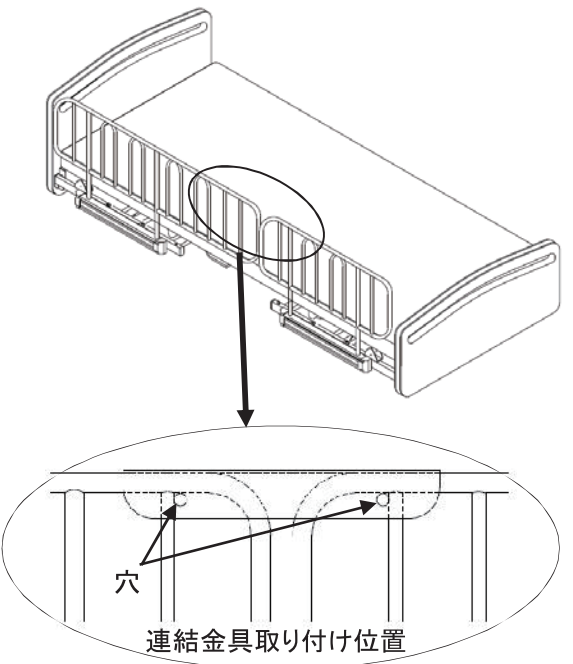


- ロングサイドレールとさしこみサイドレール(AS-078、AS-378)を連結金具で固定してください。

①連結リベットを挿入

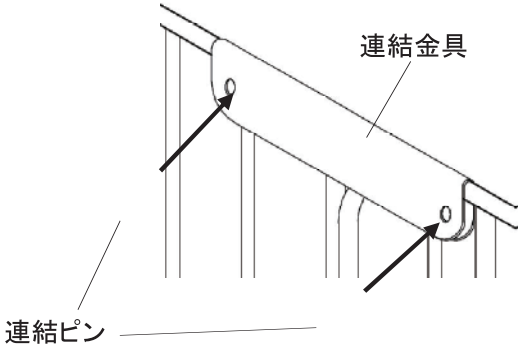


②連結金具の裏側よりスナップピンでリベットを固定

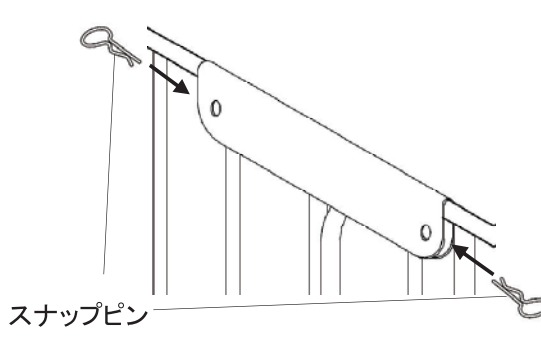

警告

ロングサイドレール単体、または連結金具を取り付けずのご使用は絶対にしないで下さい。

- サイドレールが破損したり、サイドレールが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。

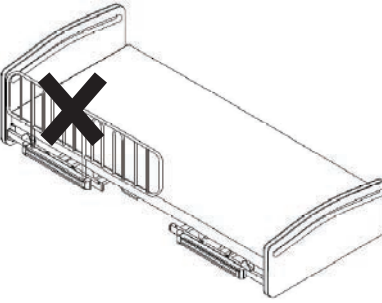

警告

マットレス上面とサイドレール下側にすき間が生じるようなマットレスは使用しないで下さい。

- マットレスは長期使用すると弾力性が衰えてきて、サイドレール下部との間にすき間が出来ることがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

仕様

名称		ロングサイドレール
品番		AS-1180、AS-1180-1
寸法	長さ	1180mm
	高さ	510mm
	ボトム面からの高さ	370mm
材質	本体	スチール製(粉体抗菌塗装仕上げ)
	ホルダーキャップ	PP(ポリプロピレン)
重量		3.2kg(1本)