

床高3段調節ベッド

【ハンドルギヤッチ・レベルベッド】

この度は、ランダルコーポレーションの製品をお買いあげ、またはレンタル頂き、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」には、「床高3段調節ベッド」を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。また組み立て手順も記載されております。ベッドを安全にご使用いただくため、手順をよくご理解頂き、指示に従い正しく作業を行ってください。この「取扱説明書」は、いつでもごらんいただけるように大切に保管してください。



【ハンドルギヤッチベッド】

LB-5257, LB-5254, LB-5251, ... 2ハンドル
LB-5207, LB-5204, LB-5201

LB-5107, LB-5104, LB-5101, ... 1ハンドル



【レベルベッド】



LB-2177, LB-2174, LB-2171

目次

1.各部の名称	1
2.安全にご使用いただくために	2～3
3.日常の使用方法和操作	4
4.組立方法	5
5.故障時の取扱いについて	6
6.仕様について	7
7.故障かなと思ったら	7
8.アフターサービスについて	8

7. 各部の名称

【ハンドルギッチベッド】 LB-5257, LB-5254, LB-5251
LB-5207, LB-5204, LB-5201
LB-5107, LB-5104, LB-5101

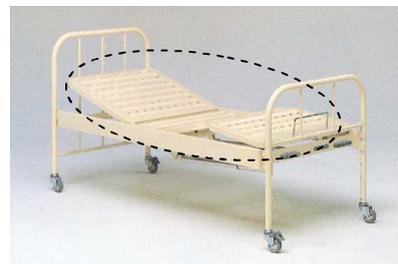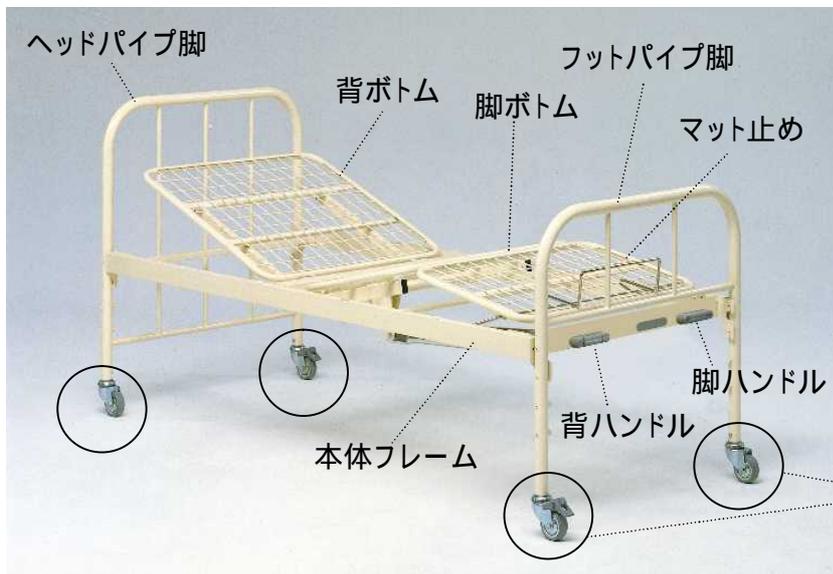


LB-5257
LB-5254 タイプ



LB-5251
LB-5201 タイプ
LB-5101

【レベルベッド】 LB-2177, LB-2174, LB-2171

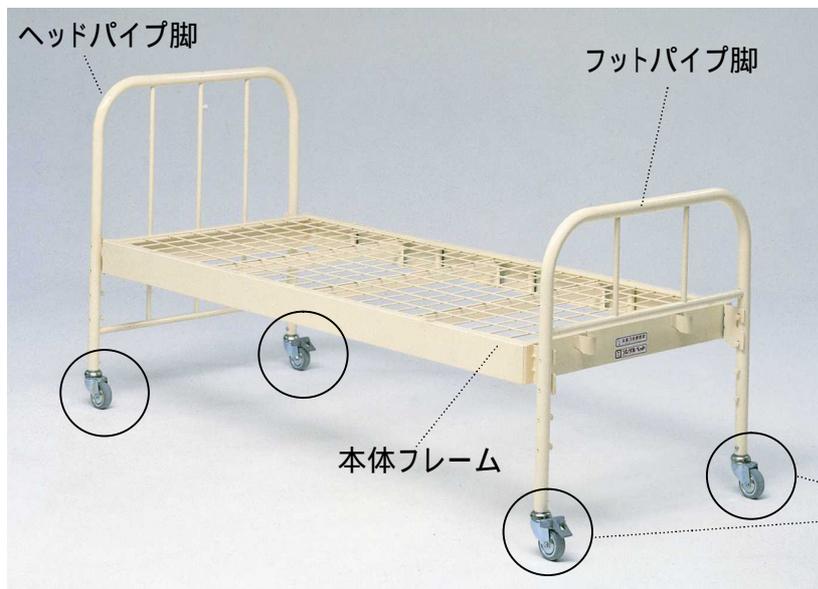

LB-5251
LB-5201 タイプ
LB-5101

2. 安全に使用いただくために

この取扱説明書では、ベッドを安全に正しくお使いいただくために、守らなければならない内容や、注意する必要がある内容について、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指はさみ注意）が描かれています。

警告


- ベッドの近くにストーブ等の熱器具を置かないでください。火災や変質、変形の原因になります。
- ベッドの上での喫煙はお止めください。火災の原因になります。
- ベッドの上で飛び跳ねたり、不用意に立上ったりしないでください。転倒し、けがをしたりベッドが破損する可能性があります。
- ベッドの設置場所の上部に不安定な物を置かないでください。地震等の際に落下してけがをする可能性があります。
- 運転中はベッドの可動部に近寄ったり、触ったりしないでください。挟まれたり巻き込まれたりしてけがをする可能性があります。
- この取扱説明書に記載されている分解手順以外の製品の分解や改造は、絶対にしないでください。故障や人身事故を招く恐れがあります。
- ベッドの下に潜り込んだり、頭・手・脚等を入れないでください。可動部分に挟まれてけがをする恐れがあります。
- ベッドの上に二人以上乗って使用しないでください。ベッドが破損する可能性があります。
- 12才以下の子供や自分で適切に操作できない方には、一人で操作させないようにしてください。故障や人身事故を招く恐れがあります。

⚠ 警告

ハンドルを操作するときは、寝ている方の手足がベッドから出ていないか確認して下さい。挟まれてけがをする可能性があります。

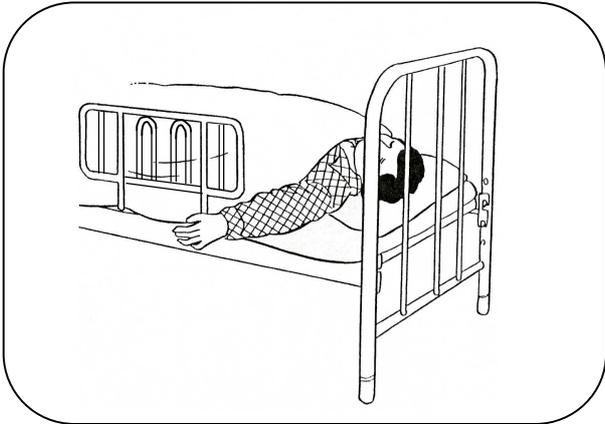

サイドレールを手すりとして使用しないでください。破損したり、外れてけがをする可能性があります。

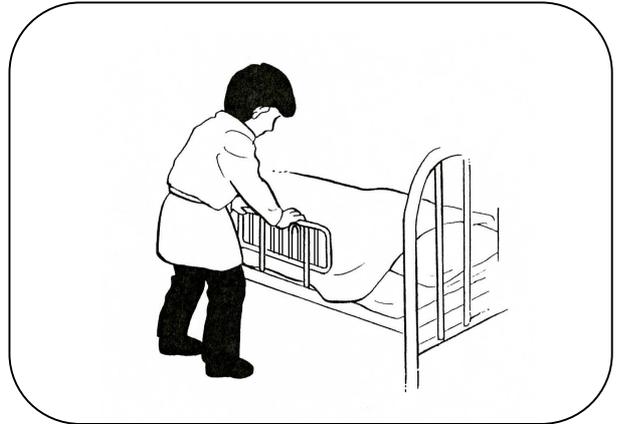


⚠ 注意

- ベッドの周辺には危険物を置かないでください。ベッドから落下した時、けがをする可能性があります。
- ベッドの移動は必ず二人以上で行ってください。引きずると、床に傷が付いたりベッドを破損する可能性があります。
- ベッドの下に物を置かないでください。ベッド操作時に部品が干渉し故障の原因になります。
- 平らな場所に設置してください。ガタツキや異常音など故障の原因になります。
- 故障や異常に気が付いたら即座に使用を中止してください。そのまま使用すると故障の原因になります。
- 電源コードはベッドで踏んだり他の物で挟んだりしないでください。
- 電源は直接コンセントからとってください。
- ベッドでマッサージを行うときは、ベッド床を最低位置まで下げてください。
- 治療中の方は担当医に相談してからベッドを使用してください。ベッドの操作が病状を悪化させる可能性があります。
- 指定製品以外での組み合わせはしないでください。事故や故障の原因になります。
- ベッド本体やボトムにヒモなどを縛ったままベッドを操作しないでください。

⚠ 注意

フレームを持って移動しないでください。パイプ脚が外れる可能性があります。

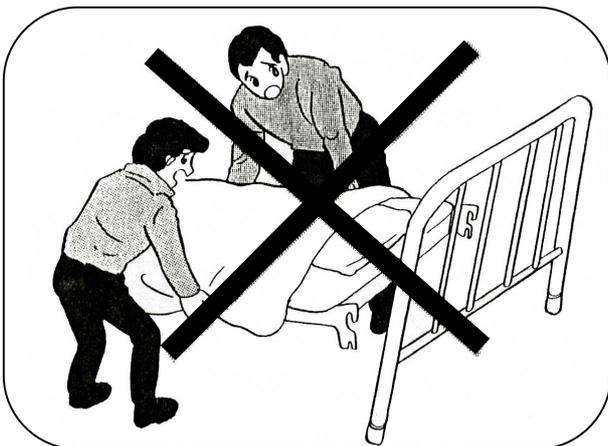

⚠ 注意

パイプ脚が外れる可能性があります。移動するときは、必ず頭・脚両側のパイプ脚部分を2人で持って移動してください。片側だけ持ち、引きずると外れてけがをする可能性があります。




3. 日常の使用方法和操作

⚠ 警告

12歳以下のお子様や自分でベッドを適切に操作できない方には、一人でベッドを操作させないでください。

■ ハンドル操作方法 ハンドルギャッチベッドのみ

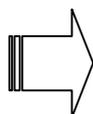

背ボトムの角度を調整します。
(水平から最大75度)



膝ボトムを調整します。
(水平から最大30度)

型番: LB-5257, LB-5254, LB-5251
LB-5207, LB-5204, LB-5201

■ 日常のお手入れ

⚠ 注意

シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

● ベッドのお手入れ

水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き、乾いた布でよく拭き取ります。シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

● マットレスお手入れ

使用の状態に応じて2週間から4週間に一度、ベッドから降ろし風通しの良いところで陰干してください。

● ネジ類のゆるみの点検

ゆるんでいるネジは締めるようにしてください。

ノブボルトなど、取り付けネジがゆるんでいないか時々点検してください。

4. 組み立て方法


1 本体フレームとパイプ脚を取付けます

本体フレームを2人で持ち、片手で支えながらそれぞれのパイプ脚と連結して下さい。



連結はヘッドフットパイプ脚のフックピンに下図のように本体フレームを引っ掛けてください。




拡大図

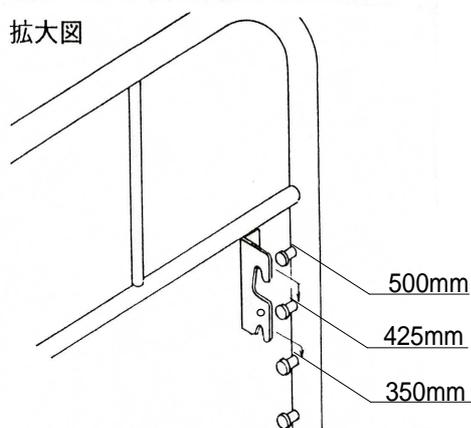

ポイント

床高は引っ掛けるピンの高さにより変わります。
上から500mm・425mm・350mm


2 本体フレームとパイプ脚が外れないように、ノブボルトで固定します。

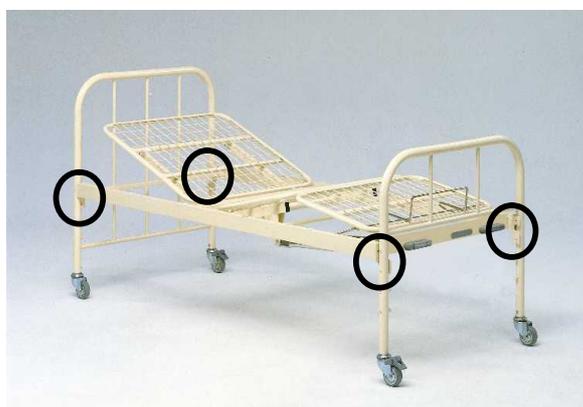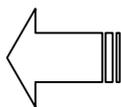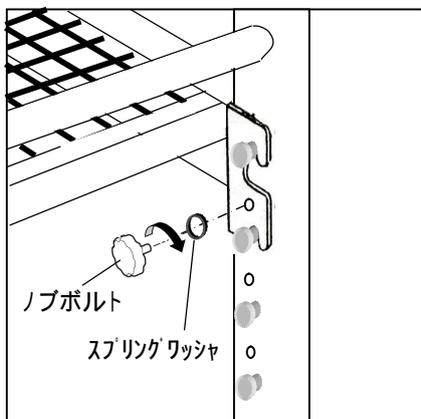

3 マット止めを取付けます

マット止めを少し広げながら、メッシュを挟み込むように脚側のメッシュに取付けます。

ハンドルギャッチベッドのみ

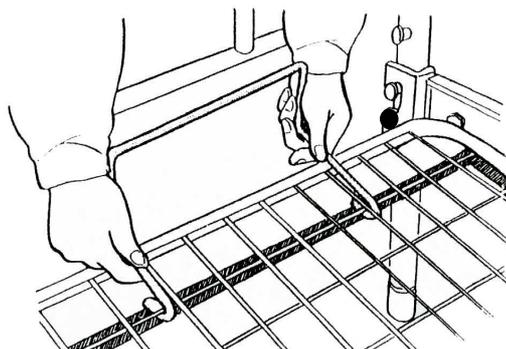

5. 故障時の取り扱いについて


ベッドの故障時に、背ボトム、膝・脚ボトムが上がったままの状態を平らにすることができます。 ハンドルギャッチベッドのみ

- ① 寝具やマットレスを降ろします。
- ② 下げたいボトムの駆動部の連結を解除します。

注 意

連結部を解除すると、ハンドルにより駆動していた部分が自由な状態となり平らな状態へ戻ります。手などをはさまないように注意してください。

ボトムを起こすと図のような連結部があります。連結部を固定しているスナップピンを抜き、連結ピンを取り外します。

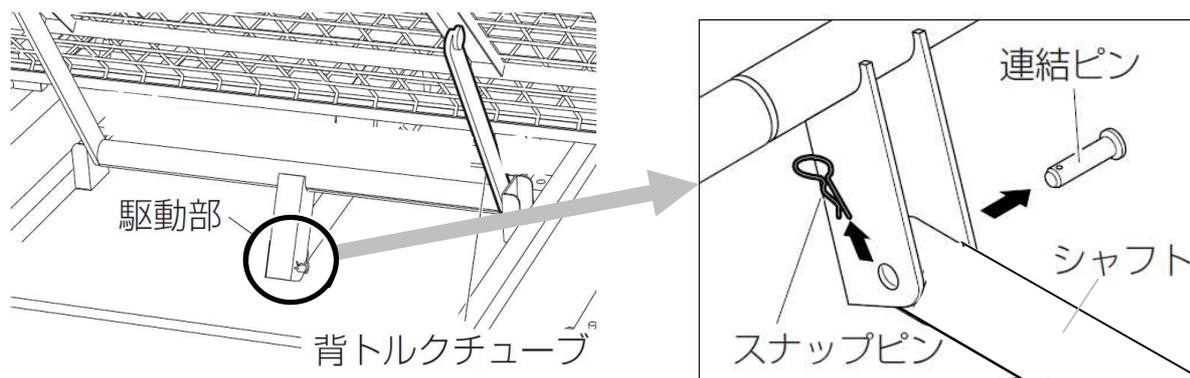

- ③ 駆動部を平らな状態にします。

6. 仕様について

本体(ハンドルギッチベッド)

ハンドル数		1ハンドルタイプ			2ハンドルタイプ		
キャスター仕様		75 シングルロック	75 ダブルロック	キャスターなし	75 シングルロック	75 ダブルロック	キャスターなし
型番	鋼板ボトム				LB-5257	LB-5254	LB-5251
	メッシュボトム				LB-5107	LB-5104	LB-5101
		LB-5207	LB-5204	LB-5201			
サイズ		全長1150mm×幅730mm×高さ1370mm					
ベッド床高		350・425・500mmの3段調節式					
ヘッドパイプ高さ		1000mm					
フットパイプ高さ		850mm					
材質		スチール製:抗菌粉体塗装					
重量 (kg)	LB-5257	57					
	LB-5254	55.5					
	LB-5251	53.5					
	LB-5107	47.5					
	LB-5104	46					
	LB-5101	44					
	LB-5207	49.5					
	LB-5204	48					
耐荷重		100kg					

本体(レベルベッド)

キャスター仕様		75 ダブルロック	75 シングルロック	キャスターなし
型番		LB-2177	LB-2174	LB-2171
サイズ		全長1150mm×幅730mm×高さ1370mm		
ベッド床高		350・425・500mmの3段調節式		
ヘッドパイプ高さ		1000mm		
フットパイプ高さ		850mm		
材質		スチール製:抗菌粉体塗装		
重量 (kg)	LB-2177	34.5		
	LB-2174	33		
	LB-2171	31		
耐荷重		100kg		

7. 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に以下の項目をチェックしてください。それでも改善されないときは、ベッドの使用をやめて販売店に修理を依頼してください。

チェック1 ハンドルギッチベッドのみ

症状:ハンドルを動かしても動作しない

対応:紐でボトムをフレームなどに縛っていませんか?紐を取り外してください。

チェック2

症状:床高を変えたいが、本体フレームとパイプ脚が外れない

対応:ノブボルトで固定していませんか?ノブボルトを取り外してください。

8. アフターサービスについて

■ 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

日付の記入がない場合は、ベッドお買い上げの領収書を保証書と一緒に保管してください。

■ 修理を依頼されるとき

本書の「7. 故障かな？と思ったら」(7 ページ)に従って調べてください。それでも直らない場合は、お買い上げ販売店、または弊社営業所・サテライトにご連絡ください。

◎ 連絡していただきたい内容

- 品名, 品番, 製品識別表示ラベルの番号
- お買い上げ日
- 故障, または異常の内容 (できるだけ詳しく)
- お名前, ご住所, および電話番号

◎ 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

◎ 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

■ 製品の最低保有年数は

弊社では、ベッドの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後、7年としております。

ランダルコーポレーション営業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの
営業所・サテライトまでお問い合わせください。

本社工場	〒 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 42-1 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-3535
青森サテライト	〒 030-0921 青森県青森市原別 8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534
岩手営業所	〒 020-0846 岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631
仙台営業所	〒 984-0821 宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287
埼玉北サテライト	〒 347-0002 埼玉県加須市外野 432 TEL.0480-69-2171 FAX.0480-69-2172
所沢営業所	〒 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 42-1 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134
八王子サテライト	〒 193-0824 東京都八王子市長房町 22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167
東京営業所	〒 120-0005 東京都足立区綾瀬 1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081
千葉サテライト	〒 262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2-9-21 RT サンライト 101 号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754
横浜サテライト	〒 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-30-6 TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053
名古屋サテライト	〒 485-0059 愛知県小牧市小木東 1-12 TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830
大阪営業所	〒 578-0981 大阪府東大阪市島之内 2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
神戸サテライト	〒 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通 4-1-2 TEL.078-579-6525 FAX.078-579-6526
岡山サテライト	〒 700-0975 岡山県岡山市今 8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066

販売店



株式会社ランダルコーポレーション本社

〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1

代 表 : TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3709

営業部ダイヤルイン : TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

0703-14