

## ● 仕様について

- 材 質： 本体 スチール製（抗菌粉体塗装仕上げ）  
生地 ポリエステル
- 外 寸： 605 × 260 × 115 (mm)
- 重 量： 2.5kg（梱包時 3.2kg）
- 内容物： 本体 ..... 1  
スプリングワッシャ ..... 2  
平ワッシャ ..... 2  
ノブボルト ..... 2  
本紙 ..... 1

## ランダルコーポレーション営業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの営業所・サテライトまでお問い合わせください。

青森サテライト	〒030-0921	青森県青森市原別 8-9-1	TEL.017-736-9535	FAX.017-736-9534
岩手営業所	〒020-0846	岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20	TEL.019-614-3007	FAX.019-639-0631
仙台営業所	〒984-0821	宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54	TEL.022-782-5286	FAX.022-782-5287
埼玉北サテライト	〒347-0002	埼玉県加須市外野 432	TEL.0480-69-2171	FAX.0480-69-2172
所沢営業所	〒354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井 421	TEL.049-274-3132	FAX.049-274-3134
八王子サテライト	〒193-0824	東京都八王子市長房町 22-26	TEL.0426-68-9168	FAX.0426-68-9167
足立営業所	〒120-0005	東京都足立区綾瀬 1-20-18	TEL.03-5629-5080	FAX.03-5629-5081
品川営業所	〒140-0001	東京都品川区北品川 1-3-7	TEL.03-5769-0740	FAX.03-5769-0741
横浜サテライト	〒220-0023	神奈川県横浜市西区平沼 1-30-6	TEL.045-317-6052	FAX.045-317-6053
名古屋サテライト	〒485-0059	愛知県小牧市小木東 1-12	TEL.0568-43-0790	FAX.0568-43-0830
大阪営業所	〒578-0981	大阪府東大阪市島之内 2-14-27	TEL.0729-60-3600	FAX.0729-60-3700
神戸サテライト	〒652-0804	兵庫県神戸市兵庫区塚本通 4-1-2 島山ビル	TEL.078-579-6525	FAX.078-579-6526
岡山サテライト	〒700-0975	岡山県岡山市今 8-3-35	TEL.086-242-6055	FAX.086-242-6066

### 株式会社ランダルコーポレーション本社

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1

代 表：TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3709  
営業部ダイヤルイン：TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

ベスティー和シリーズ  
Desty Nagomi

## ポケット付固定型サイドレール 取扱説明書

### AS-160P


このたびは、「ベスティー和シリーズ ポケット付固定型サイドレール」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや不都合が生じたときお役立てください。

ポケット付固定型サイドレールはベッドで寝ている人の転落防止、寝具の落下防止として使用します。

収納部にはテレビなどのリモコンや雑誌などを収納することができます。

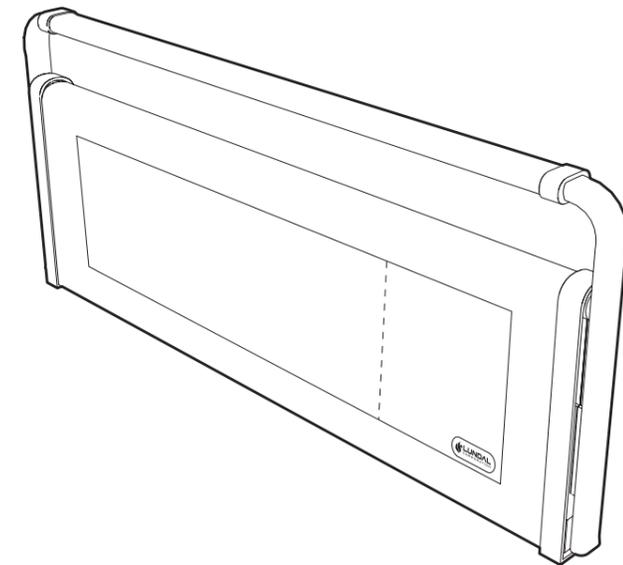

## ● 安全にご使用いただくために

次の内容は安全上とても重要です。必ずお守りください。

### ⚠ 注 意


- ・ 取り扱いを誤ると重大事故につながるおそれがありますので、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・ 固定式サイドレールに腰掛けたり、もたれかかったりしないでください。体重がかかっている状態で抜けると転倒してけがをする恐れがあります。



固定型サイドレールを取り付けるために一部ベッドを稼動させます。

ベッドの操作方法についてはベッド備え付けの取扱説明書をご覧ください。

## ● 取り付け方法

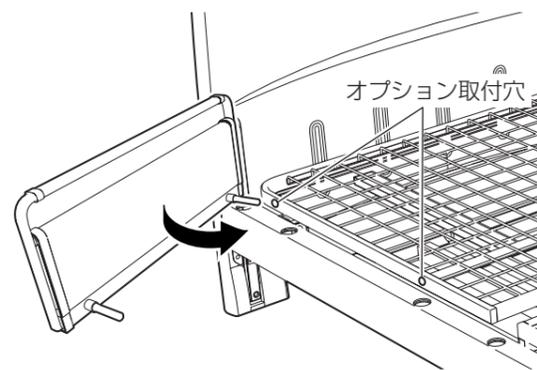

- ベッドの背ボトム側面にあるオプション取付穴（2カ所）に固定型サイドレールを差し込みます。

- ベッドの手元スイッチを操作して、背ボトムを上げます。

-  ベッドの操作方法はベッド備え付けの取扱説明書をご覧ください。

- ベッドの電源プラグをコンセントから抜きます。




### ⚠ 注意

ベッド背上げ後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。作業中、誤操作などによりベッドが稼動し、けがをする恐れがあります。

- 背ボトムの裏にあるオプション固定穴とサイドレールの固定穴が合っていることを確認し、スプリングワッシャ、平ワッシャをセットしたノブボルト（2カ所）で固定します。

### ⚠ 注意


- ・ サイドレール固定時に、ベッドの駆動部に指などを挟まないよう注意して作業を行ってください。
- ・ サイドレール取り付け後、ノブボルトが強くしめてあるか確認してください。ノブボルトがゆるんでいるとサイドレールが外れてけがをする恐れがあります。

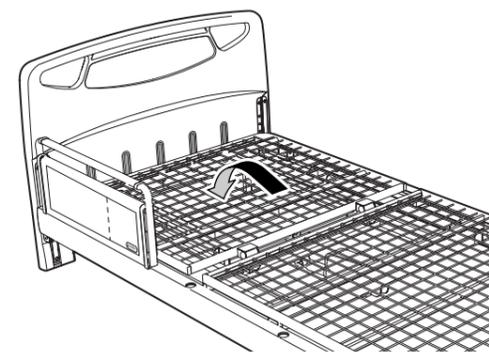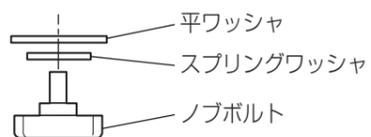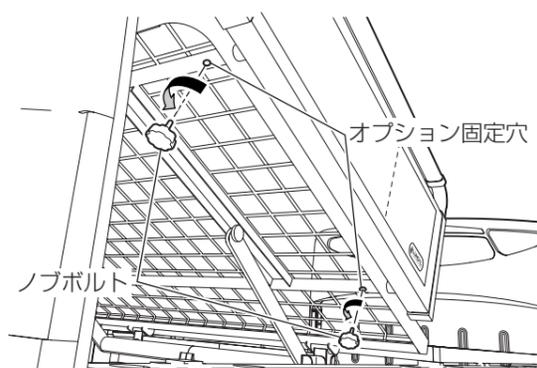

- ベッドの電源プラグをコンセントに差し込み、ベッドの手元スイッチを操作して背ボトムを下げます。


- 以上で「ポケット付固定型サイドレール」の取り付けは終了です。

## ● 収納部について

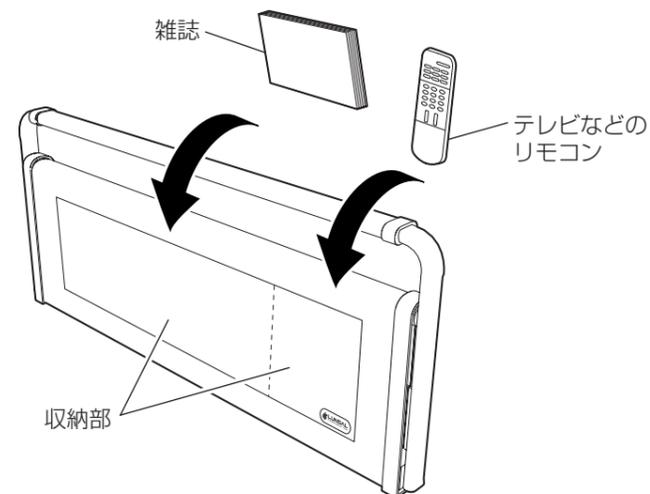

- 収納部にはテレビなどのリモコンや雑誌などを収納することができます。

## ● 洗濯時における生地を取り外し方

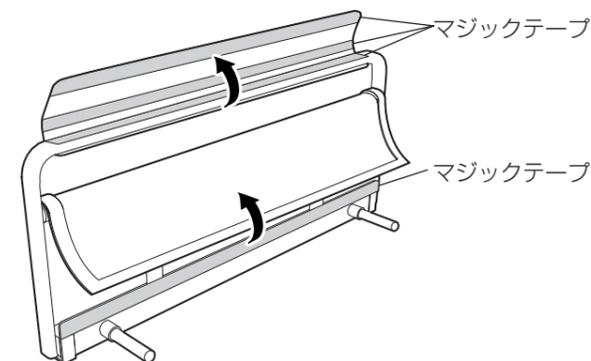

- 生地を固定しているマジックテープをはがします。

- サイドレールフレームから生地を取り外します。

- 以上で、洗濯時における生地を取り外しは終了です。