

“座る”から“立つ”へ、自立の次のステップを可能にする。

うごけばーあIII・IV

AC-036 AC-045 AC-046

このたびは、「うごけばーあ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
製品の取扱については、この取扱説明書に必ず従って下さるようお願い申し上げます。

正しくお使いいただくために、
この取扱説明書をよくお読み下さい。
お読みになったら後は、
大切に保管して下さい。





このイラストは商品の使用イメージです。
実際の商品とは形が多少異なります。




ランダルコーポレーション

各部の名称ロックレバーの使い方・取付方法・仕様

各部の名称・ロックレバーの使い方

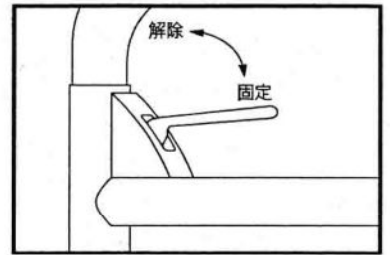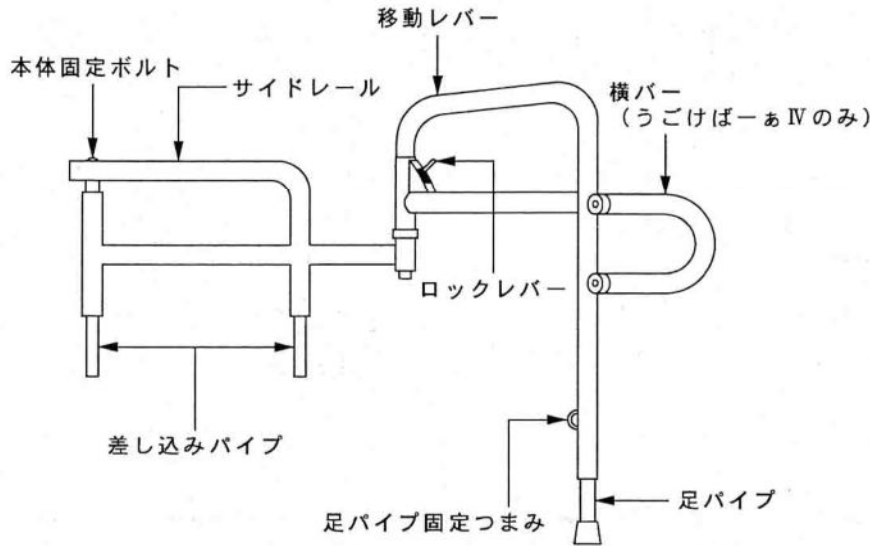

レバーを上にとするとロックが解除されます。移動レバーを使いやすい位置にし、ロックレバーを下げて固定してください。

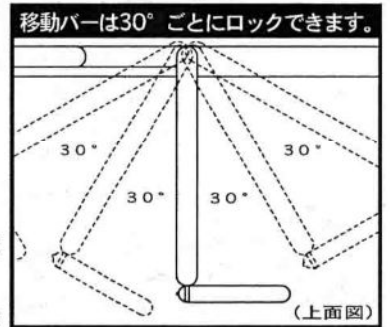

移動バーが完全に固定されたことを確認してからお使いください

ベッドの取付・仕様

- 1 本体を持ちやすいようにするために、ロックレバーを操作して本体を直角の位置で固定してください。
- 2 差し込みパイプ部をベッドのサイドレール取付穴に差し込んでください。
- 3 付属の太い方の六角レンチを差し込み、右に回転させて締め付けてください。
- 4 足パイプ固定つまみを操作して足パイプがしっかり床に着くように調整してください。
- 5 横バーを取付けてください。(うごけばーあⅣのみ)

平ワッシャ
六角レンチ (付属品)
スプリングワッシャ
六角ネジ

Uパイプは左右どちらにも取付けられます

仕様	品名	型式	移動バーサイズ		横バーサイズ	共通仕様
	うごけばーあⅢ	AC-036	幅600mm	高さ (370mm+ベッド高) 最大870mm以下	なし	
	うごけばーあⅣ	AC-045	幅550mm		幅200mm 高さ190mm	パイプ径32 スチール製 粉体塗装仕上
	うごけばーあⅣ	AC-046	幅600mm			



ランダルコーポレーション

株式会社ランダルコーポレーション

本社・事業所	〒354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井421	TEL 0492-74-3132	FAX 0492-59-3535
岩手営業所	〒020-0861	岩手県盛岡市仙北2-26-14	TEL 019-631-1244	FAX 019-631-1034
仙台営業所	〒984-0821	宮城県仙台市若林区中倉3-17-54	TEL 022-782-5287	FAX 022-782-5287
所沢営業所	〒354-0044	埼玉県入間郡三芳町北永井421	TEL 0492-74-3133	FAX 0492-59-3535
品川営業所	〒140-0001	東京都品川区北品川1-3-7	TEL 03-5769-0740	FAX 03-5769-0741
足立営業所	〒120-0005	東京都足立区綾瀬1-20-18	TEL 03-5629-5080	FAX 03-5629-5081
大阪営業所	〒578-0901	大阪府東大阪市加納3-8-16	TEL 0729-60-3600	FAX 0729-60-3700



安全上のご

ご使用の
前に！！

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」と「注意」の2つに分けて表示してあります。いずれも重要な内容ですのでよく理解し、必ずお守り下さい。

警告 取扱を誤ると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取扱を誤ると、傷害または物質的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

図記号例



警告や注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。




行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

！ ベッドの操作前に必ず確認して下さい。

ベッドの背上げ操作などをする時は手や足などが「うごけばーあ」から出ていないか、また、小さなお子様がベッドの近くにいないか確認して下さい。挟まれてけがをする可能性があります。

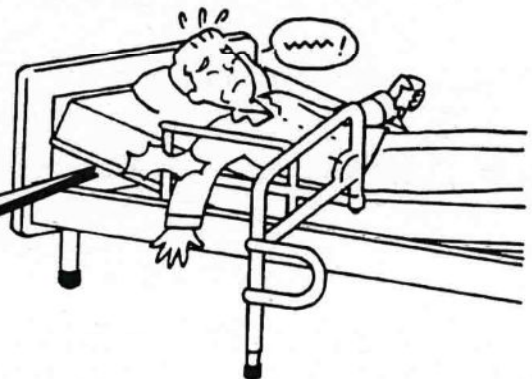


手や足がベッド作動時に挟まるとけがをします。

○ ベッドの操作前に必ず確認して下さい。

「うごけばーあ」の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。転落し、けがをする可能性があります。



危険ですので上に乗らないで下さい。

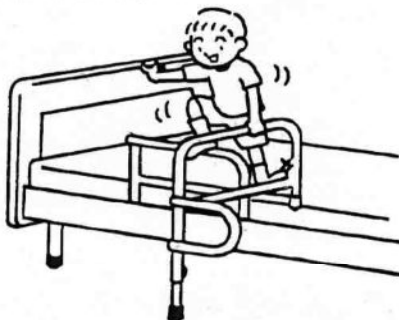

危険ですので上に座らないで下さい。




注意

警告

ストーブなどの熱器具を近くに置かないで下さい。

「うごけばーあ」の近くにストーブなどの熱器具を置かないで下さい。火災の発生や火傷をする可能性があります。

熱により燃える場合があります。

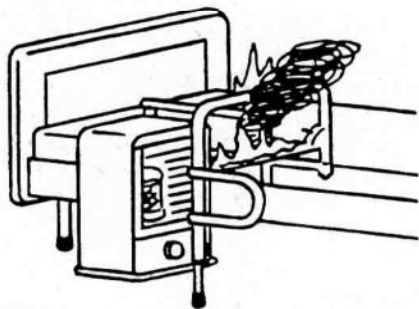


熱により「うごけばーあ」が熱くなる場合があります。



改造・分解はしないでください。

どのような場合にも改造や分解はしないで下さい。思わぬ事故の原因になります。

危険ですので改造はしないでください

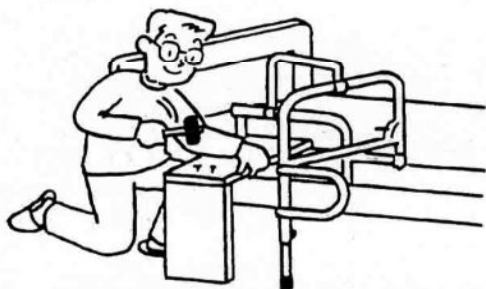


危険ですので、分解しないでください。



注意

ハイ・ロー機能付きベッドは操作に注意。

ベッドを上げた状態で足パイプ固定つまみを締めると、ベッドを下げた時に「うごけばーあ」を破損する可能性があります。ハイ・ローベッドを下げている時には必ず足パイプ固定つまみをゆるめて下さい。

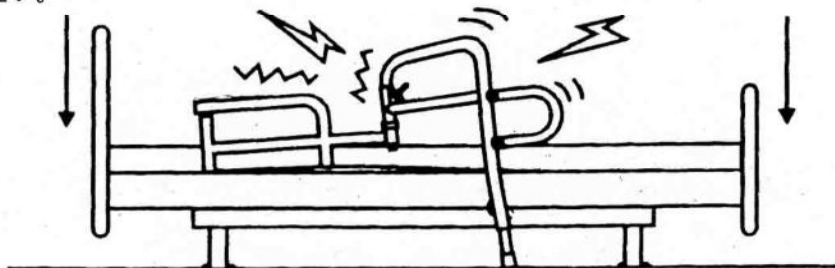

床高を無理に下げると壊れます。