

ランドルコーポレーション営業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの営業所・サテライトまでお問い合わせください。

- 製造統括部 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421
TEL.049-259-4433 FAX.049-259-3535
- 青森サテライト 〒030-0921 青森県青森市原別 8-9-1
TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534
- 岩手営業所 〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20
TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631
- 仙台営業所 〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54
TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287
- 埼玉北サテライト 〒347-0002 埼玉県加須市外野 432
TEL.0480-69-2171 FAX.0480-69-2172
- 所沢営業所 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421
TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134
- 八王子サテライト 〒193-0824 東京都八王子市長房町 22-26
TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167
- 東京営業所 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 1-20-18
TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081
- 千葉サテライト 〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2-9-21
RT サンライト 101 号室
TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754
- 横浜サテライト 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-30-6
TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053
- 名古屋サテライト 〒485-0059 愛知県小牧市小本東 1-12
TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830
- 大阪営業所 〒578-0981 大阪府東大阪市島之内 2-14-27
TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
- 神戸サテライト 〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通 4-1-2
TEL.078-579-6525 FAX.078-579-6526
- 岡山サテライト 〒700-0975 岡山県岡山市今 8-3-35
TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066



株式会社ランドルコーポレーション本社

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1

代表：TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3709
営業部ダイヤルイン：TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

08.02.18

取扱説明書

AC-050

うごけばーあミニ




このたびは、「うごけばーあミニ」をお買い上げ、レンタルしていただき誠にありがとうございます。
うごけばーあミニは立ち上がり補助用具(介助バー)として使用します。
この取扱説明書には、うごけばーあミニを安全にご使用いただくための注意事項、取付方法や
使用方法などを記載しております。
ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みの上、正しくご理解し安全にご使用ください。
お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや不都合が生じたとき
お役立てください。

目次

- 1 各部の名称 1
- 2 安全にご使用いただくために 1 ~ 2
- 3 取付方法 3
- 4 使用方法 3
- 5 日常のお手入れおよび点検 4
- 6 仕様 4
- 7 アフターサービスについて 4

株式会社ランドルコーポレーション

1 各部の名称

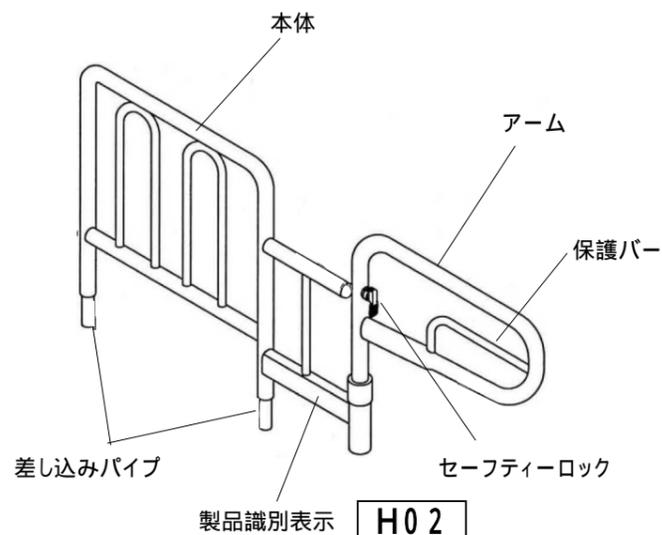

2 安全にご使用いただくために

取り扱いを誤ると重大事故につながるおそれがありますので、ご使用前に本書を必ずよくお読みの上、正しくご使用ください。

警告 この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指さし注意）が描かれています。




⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

【警告ラベル】

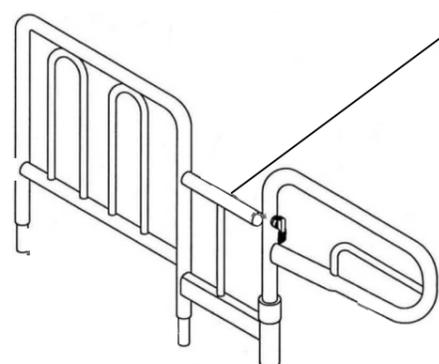

警告 頭、腕や足を介助バーから出したまま背上げ・膝上げ操作をしないでください。アームを固定してご使用ください。固定しないとけがや破損の原因になることがあります。

うごけばーあミニをご使用して頂く上で、注意して頂きたい項目をラベルにして貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないで下さい。

ラベルが剥がれたり、傷ついてしまった場合はお近くの販売店に連絡してください。

5 日常のお手入れおよび点検

◎ 水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。汚れを落としたり乾いた布で拭き取ってください。



警告 ネジ類のゆるみの点検
サイドフレームのノブボルトなど、取り付けネジがゆるんでいないか時々点検してください。ゆるんでいるネジは締めるようにしてください。



警告 製品の動作に異常がないか定期的に点検してください。



注意 シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。



6 仕様

名称	うごけばーあミニ
品番	AC-050
材質	スチール製(粉体抗菌焼付塗装)
外寸	長さ980mm、高さ510mm (ボトム面よりアーム高さ300mm)
製品重量	約5.9kg
内容物	本体・六角レンチ

7 アフターサービスについて

■ 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。日付の記入がない場合は、ベッドお買い上げの領収書を保証書と一緒に保管してください。

■ 修理を依頼される時

◎ 連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号
- お買い上げ日
- 故障、または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所、および電話番号

◎ 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 製品の最低保有年数は

弊社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後、7年としております。



当社製以外のベッドに取り付けて使用しないでください。
破損したり、思わぬ事故によりケガをする可能性があります。

ベッドを操作する際に、介助バーより外に頭や手足などを出さないでください。
周辺の物との間または介助バーのすき間に挟まれ、
生命に関わる重大な事故が発生する可能性があります。



本書に記載されている手順以外に、分解や改造を絶対に行わないでください。
介助バーが破損したり、介助バーが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。




介助バーに腰を掛けたり、もたれかかたりしないでください。
介助バーが破損したり、介助バーが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。

アーム部をベッド内側にむけて使用しないで下さい。
アームとベッドの間にはさまれて生命に関わる事故を起こす可能性があります。

サイドレールとのすき間に十分注意してください。
差し込みサイドレールと組み合わせてご使用する場合、
サイドレールとのすき間に頭や首をはさまれるおそれがあります。



ベッドのヘッドボードとのすき間に十分注意してください。
介助バーとヘッドボードとのすき間に頭や首を
はさまれるおそれがあります。

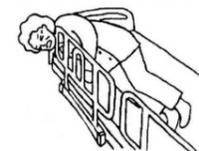

12才以下の子供や自分で適切に操作できない方には操作させないようにしてください。
ご使用は介助者が操作するようにし、適切に操作できない方(認知症)が
操作する可能性がある場合はベッドから取り外すなどをしてください。


乳幼児は介助バーのすき間から、転落するおそれがありますので介護ベッドは
使用しないでください。



ベッド本体を移動する際に、介助バーを持って移動させないでください。
介助バーが破損したり、介助バーが抜けて転倒し、ケガをする可能性があります。


指定以外の製品とは組合せしないでください。
介助バーをベッドに取り付ける際に、必ず適合品を使用してください。
ベッドや介助バーなどに負担をかけ、ケガをしたり故障するおそれがあります。
適合品については、販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。

近くにストーブ等の熱器具を置かないで下さい。
火災や火傷、変形・変質の原因になります。

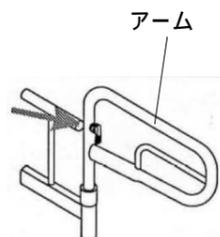

アームを回転させるときは指に注意してください。
アームのすき間(右図参照)に指を挟まないようご注意ください。
ケガをする可能性があります。

3 取り付け方法

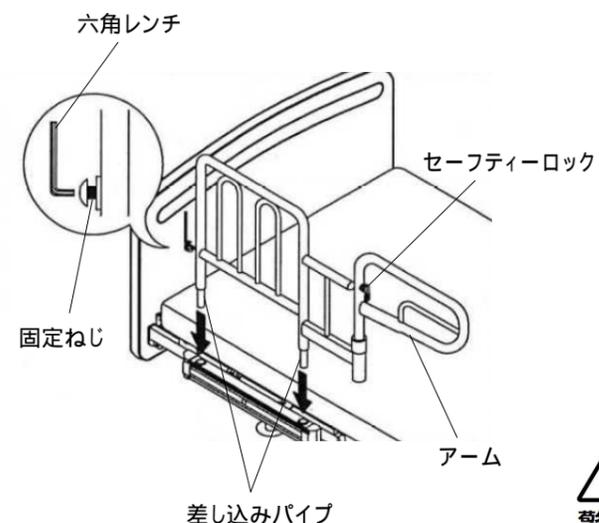

アームを固定したまま、差し込みパイプを
ベッドの固定型サイドフレームの穴へ差し込
んでください。

差し込みパイプが固定型サイドフレーム
の穴に根元まで入っていることを確認し、
付属の六角レンチで固定ねじを締め付け
て下さい。





警告 固定ねじはしっかりと締めつけてくださ
い。使用中にベッドから外れ、思わぬ
事故やケガをするおそれがあります。

4 使用方法

【アームの角度調節方法】

操作によって、アームをベッド外側へ135°まで
45°刻みで固定できます。ご使用に合わせた
角度に調節してご使用下さい。

セーフティーロックを解除し、アームを上
に持ち上げて使用したい角度に合わせてアームを
下ろしてください。

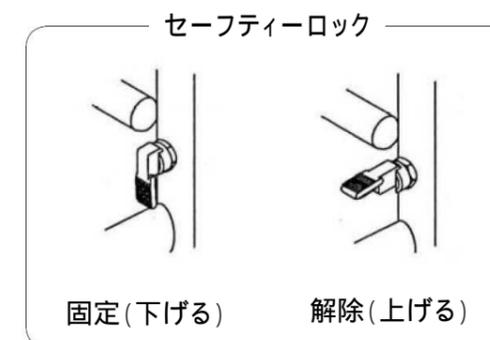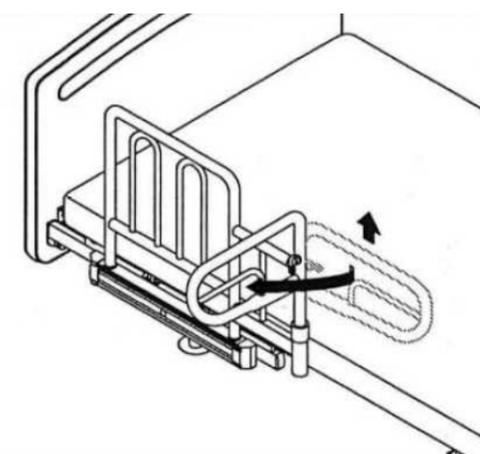

セーフティーロックを固定し、アームが持ち上
がらないか確認してください。



注意 セーフティーロックにあそび(ゆりみ)がある
場合はロックがされていないので、アーム
を少し上に持ち上げると固定されます。



警告 ご使用時はセーフティーロックが下げてあり、アームが固定されているか
確認してください。固定が不安定であると、移乗時などに転倒しケガをす
るおそれがあります。