

【サイドベッドテーブル】



この度は、ランダルコーポレーションの製品をお買いあげ、またはレンタル頂き、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」には、「サイドベッドテーブル」を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。また組み立て手順も記載されております。ベッドを安全にご使用いただくためにも、手順をよくご理解頂き、指示に従い正しく作業を行ってください。この「取扱説明書」は、いつでもごらんいただけるように大切に保管してください。



目次

| | |
|-----------------|-----|
| 1.各部の名称 | 1 |
| 2.安全にご使用いただくために | 1~2 |
| 3.日常の使用方法和操作 | 3 |
| 4.組立方法 | 4 |
| 5.仕様について | 5 |
| 6.アフターサービスについて | 5 |

1. 各部の名称

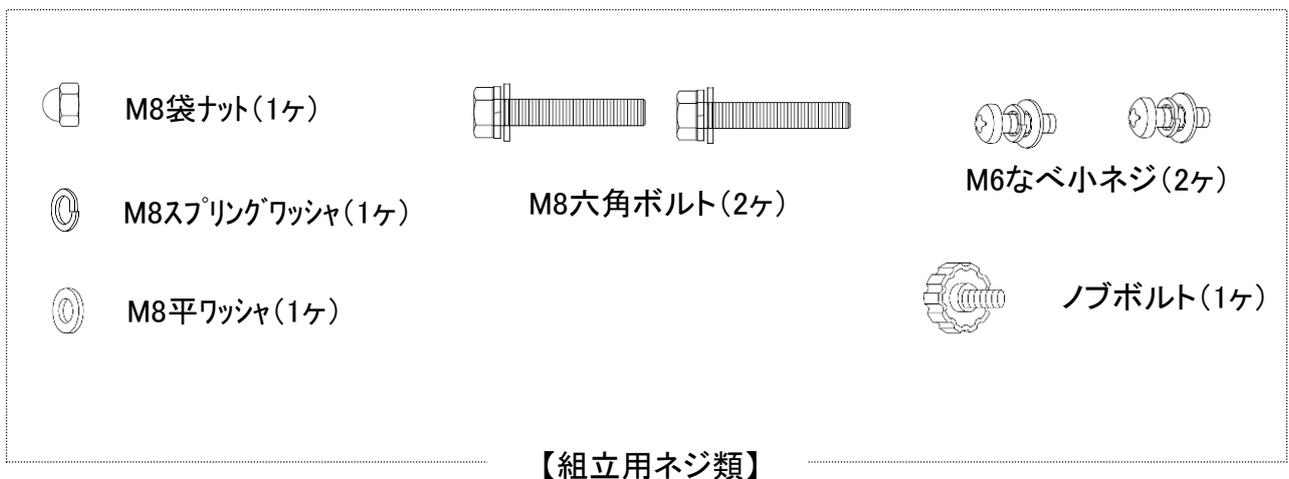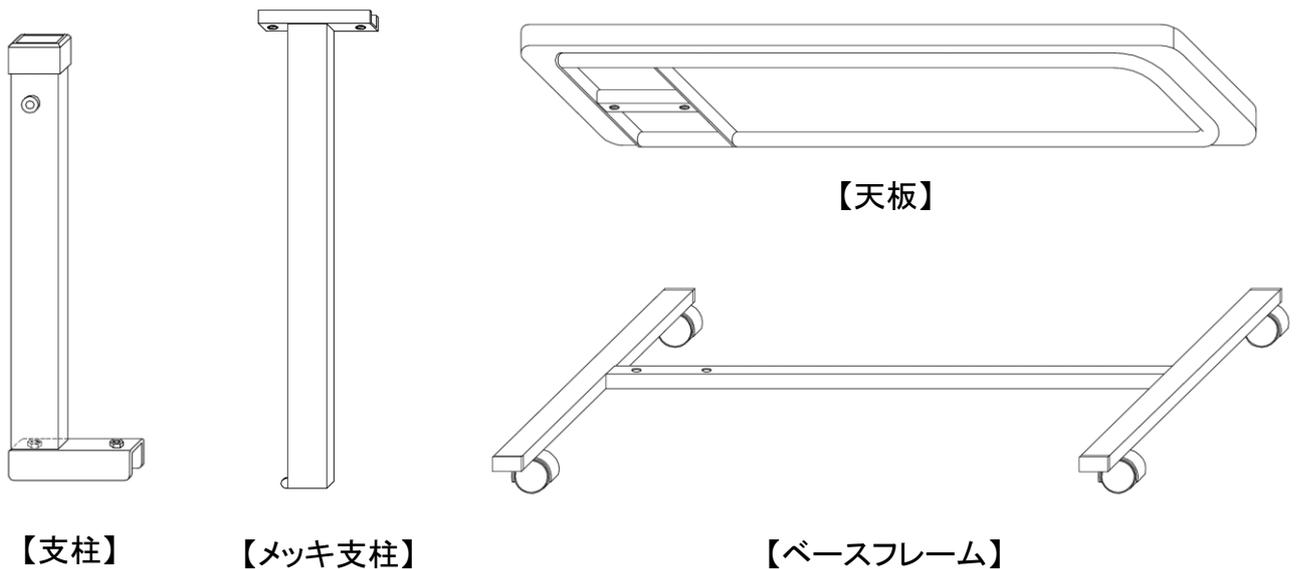

2. 安全に使用いただくために

この取扱説明書では、サイドベッドテーブルを安全に正しくお使いいただくために、守らなければならない内容や、注意する必要がある内容について、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は指はさみ注意)が描かれています。

⚠ 警告

ベッドの操作時(背上げ・脚上げ・床上げ)には、ベッドとテーブルの間に体の一部を挟まないようにしてください。



⚠ 警告

12才以下の子供や自分で適切に操作できない方には、一人で操作させないようにしてください。故障や人身事故を招く恐れがあります。




⚠ 警告

- 物を載せた状態で、操作をしないでください。
- テーブルに寄りかかったり、腰をかけたりしないでください。
- テーブルの上にやかん・ポット類などの高温の物を置かないでください。


⚠ 注意

ベッドの近くにストーブ等の熱器具を置かないでください。火災や変質、変形の原因になります。

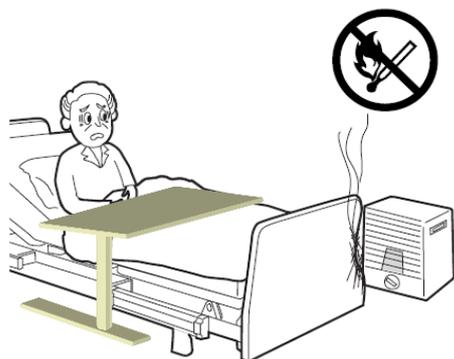

⚠ 注意

この取扱説明書に記載されている分解手順以外の製品の分解や改造は、絶対にしないでください。故障や人身事故を招く恐れがあります。

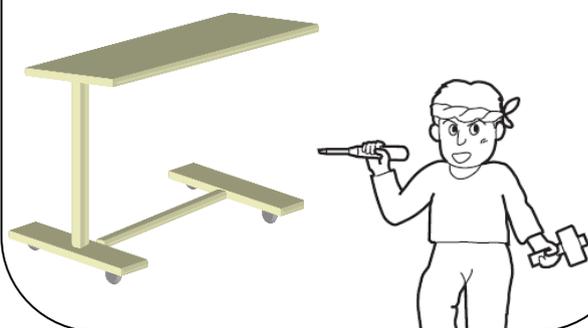


⚠ 注意

- ご使用前に、ネジ等のゆるみがないか確認してください。
- 耐荷重以上の物を載せて使用すると、破損や事故の原因になります。

3. 日常の使用方法和操作

■ 操作方法

ご利用になるテーブルの高さに合わせてノブボルトで固定してください。

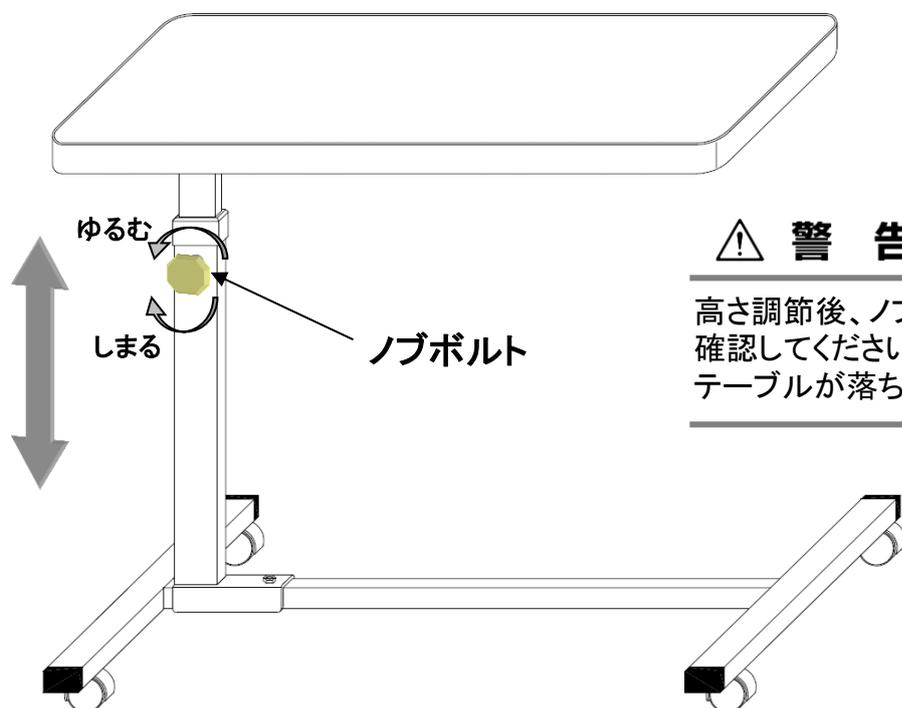

※テーブル高さは580～930mmの無段階調節です。

■ 日常のお手入れ

⚠ 注意

シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

● テーブルのお手入れ


水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き、乾いた布でよく拭き取ります。シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

● ネジ類のゆるみの点検

サイドフレームのノブボルトなど、取り付けネジがゆるんでいるか時々点検してください。ゆるんでいるネジは締めるようにしてください。


4. 組み立て方法

1 天板とメッキ支柱を取付けます

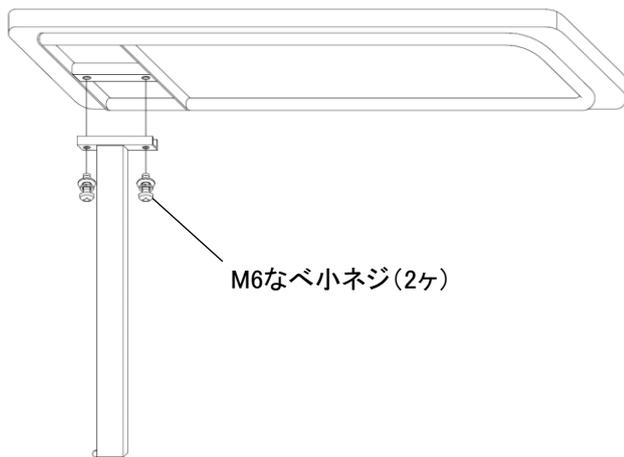


※プラスドライバーで締め付け固定します

2 支柱とベースフレームを取付けます

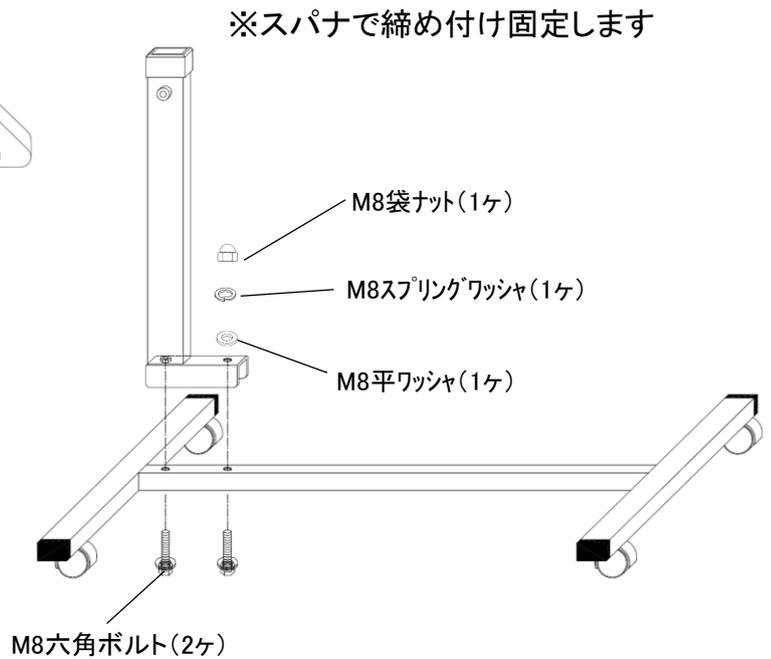

3 支柱にメッキ支柱を取付けます

※ご使用する高さに合わせてノブボルトを
しっかりと締め付け固定します

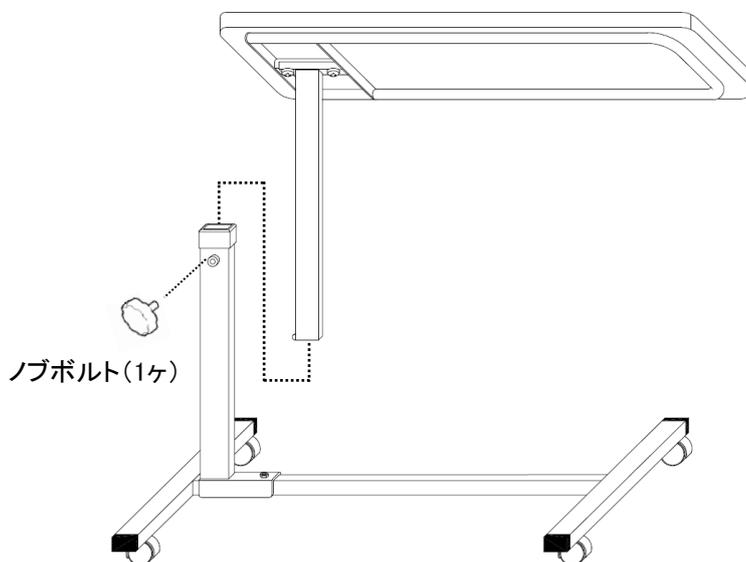

5.仕様について

■本体

| | |
|-----------|----------------------------------------------|
| 名称 | サイドベッドテーブル |
| 型番 | CA-3620 |
| 寸法[mm] | 本体[幅825×奥行470×高さ585～935] 天板[800×300] 脚高さ[62] |
| 製品重量[kg] | 7.5 |
| 梱包サイズ[mm] | 825×485×110 |
| 材質 | 本体:スチール製(抗菌粉体塗装仕上げ/クロームメッキ仕上げ) 天板:ポリ板化粧板 |
| 耐荷重[kg] | 15 |

6.アフターサービスについて

■ 保証書

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

日付の記入がない場合は、ベッドお買い上げの領収書を保証書と一緒に保管してください。

■ 修理を依頼されるとき

◎ 連絡していただきたい内容

- 品名，品番，製品識別表示ラベルの番号
- お買い上げ日
- 故障，または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前，ご住所，および電話番号

◎ 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

◎ 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

■ 製品の最低保有年数は

弊社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後、7年としております。

ランダルコーポレーション営業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの
営業所・サテライトまでお問い合わせください。

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 本社工場 | 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430 |
| 青森サテライト | 〒030-0921 青森県青森市原別8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534 |
| 八戸サテライト | 〒039-1164 青森県八戸市下長8-10-8 TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213 |
| 秋田サテライト | 〒010-0941 秋田県秋田市尻町字大川反170-81 TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862 |
| 岩手営業所 | 〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631 |
| 仙台営業所 | 〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287 |
| 埼玉営業所 | 〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134 |
| 八王子サテライト | 〒193-0824 東京都八王子市長房町22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167 |
| 東京営業所 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081 |
| 千葉サテライト | 〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-9-21 RTサンライト101号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754 |
| 横浜サテライト | 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-30-6 TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053 |
| 名古屋サテライト | 〒485-0059 愛知県小牧市小木東1-12 TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830 |
| 大阪営業所 | 〒578-0981 大阪府東大阪市島之内2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700 |
| 岡山サテライト | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066 |

販売店



ランダルコーポレーション

株式会社ランダルコーポレーション本社

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-7-1

代 表：TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3709
営業部ダイヤルイン：TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

20120418