
取扱説明書

CA-3200、CA-3201
CA-3202、CA-3203
プリベントフィット E マットレス



この度は、ランダルコーポレーションの製品をお買いあげ、またはレンタル頂き、まことにありがとうございます。

この「取扱説明書」には、マットレスを安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。

また、この「取扱説明書」は、いつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

株式会社ランダルコーポレーション

●注意事項



この表示項目を守らずに誤った取扱をすると、使用者が傷害を負ったり物的損害をこうむる恐れがあります

- 必ず医師や看護師などの専門家にご相談の上ご使用ください。
- 使用中に身体に異常や不安を感じた場合は、直ちに使用を止め専門家に相談してください。
- マットレス上で立上ったり、歩行はしないでください。転倒・転落によるケガをする恐れがあります。
- マットレスの取っ手と固定用ベルトは、必ずシーツの下に入れてください。
- マットレスの表と裏を確認し、逆に使用しないでください。
- カバーのファスナーは必ず閉めて使用してください。
- 直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 長期間マットレスの上に重量物を置かないでください。
- 圧縮した状態や曲げた状態での保管はしないでください。
- 本来の目的以外に使用はしないでください。
- 熱い物の近くに置かないでください。
- あんか、こたつなどで長い時間放置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。
- 浴室付近や湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。
- 取っ手以外を持って引っ張らないでください。
- ご使用前、ご使用後には必ず以下の点を確認してください。
 - * 取っ手や本体（カバー）にほつれや、破れはないか？
 - * 取っ手や本体に異物が刺さっていないか？
- 使用場所の凹凸、傾斜や角度、階段などの段差での衝撃に注意してください。
- カバーのみを他のマットレスに使用することはできません。
- エバキューションカバーは緊急避難時に使用する機能がついたものです。日常的な移動を目的として繰り返し使用することはできません。
- 固定用ベルト、移動用取っ手は『たるみ』のないようマジックテープに貼りつけてください。図のように『たるみ』があると移乗時に手や足などが引っ掛かる恐れがあります。



●設置方法

- ・マットレスは必ず表と裏を確認し、ベッドの上に直接マットレスを置いてください。
- ・マットレス側面にある固定ベルト及び頭側、脚側にある取っ手は、『たるみ』の無いようにマジックテープに貼りつけてください。
- ・マットレスの上からシーツをご使用ください。

●お手入れの方法

- ・カバーは取り外し、洗濯機などで洗浄が可能です。
ファスナーを閉め、洗濯ネットをご使用ください。
 - ・カバーは95℃以下の温水で洗濯可能です。
 - ・乾燥機のご使用は避け、陰干ししてください。
 - ・ドライクリーニングが可能です。
 - ・漂白剤、柔軟剤などはご使用にならないでください。
 - ・中材（ウレタン部分）は洗濯しないでください。
 - ・消毒薬やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
 - ・ポリウレタン防水をより長く保つために、最後に水拭きをしてください。
 - ・消毒薬はメーカー指定の希釈倍率でご使用ください。
 - ・次亜塩素酸ナトリウム溶液やシンナー（有機溶剤）は使用しないでください。
- 専門の業者に依頼される場合は上記の条件でご相談ください。



シンナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

◇仕 様

品番	CA-3200	CA-3201	CA-3202	CA-3203
幅(mm)	830	910		1000
長さ(mm)	1910		1800	1910
厚み(mm)	120			
重量(kg)	10.5	11.5	10.8	12.6
材 質	側	ポリエステル		
	中材	ウレタンフォーム		
最大利用者体重(kg)	120			

Made in Germany

●エバキュエーションカバーの使用方法

【カバーの特長】

プリベントフィットE マットレスのカバー（名称：エバキュエーションカバー）は、万が一の緊急時に利用者を素早く移動させることができます。

マットレス、掛布団と一緒に移動する為、衝撃や振動を軽減し、移動先でも床ずれ防止マットレスとして使用することができます。

【各部の名称】

エバキュエーションカバーには、頭側、脚側に移動用の取っ手が2箇所あり、マットレスの両側面には固定用ベルトが付いています



【固定用ベルトの取り付け】

固定用ベルトはカバー側面のマジックテープに合わせ片側を貼り、その上からもう一方のベルトを重ねて貼ってください。

頭側、脚側の移動用取っ手も同様にカバーに貼りつけてください。

ベルトは『たるみ』の無いように貼りつけてください。



側面に付属されている固定用ベルト



頭側・脚側に付属されている
移動用取っ手

【使用方法】

- ①マットレス側面にある左右の固定用ベルトを取り外します。



- ②掛布団の上から左右の固定用ベルトのマジックテープを貼り合わせ、利用者をしっかりと固定します。固定用ベルトは強く引っ張りながら緩みのないように貼り合わせてください。頭側、脚側共にベルトで固定してください。



- ③2本の固定用ベルトに緩みが無く、利用者がしっかりと固定されていることを確認し、避難行動をとってください。移動の際は、利用者の頭部を枕やクッションなどで保護してください。



固定用ベルトは必ず掛布団の上で固定してください。利用者の身体を直接ベルトで固定すると、移動時に身体が動いてしまい怪我をする恐れがあります。

【移動の方法】

①脚側、または頭側の取っ手を持ってマットレスごとゆっくりとベッドからおろし、移動してください。



②脚側の取っ手を持ち、移動します。



※移動時に取っ手を持つ際は、手でしっかりと握ってください。

(頭側、脚側の取っ手)



【移動時の注意事項】



注意

この表示項目を守らずに誤った取扱をすると、使用者が傷害を負ったり物的損害をこうむる恐れがあります

- 固定用ベルトで利用者がしっかりと固定され、ベルトに緩みが無いことを確認してください。
- 固定用ベルトが首などを圧迫しないよう注意してください。
- 移動する際は、枕やクッションを使用し利用者の頭部を保護してください。
- マットレス頭側、脚側に付属されている移動用取っ手以外は引っ張らないでください。
※ 側面の取っ手は、マットレス自体を持ち運ぶためのものです。
- 移動時に床面の凹凸、傾斜や角度、階段などの段差での衝撃に注意してください。
- ベッドからマットレスをおろす際は、ベッドをできるだけ低くして行うことをお勧めします。
- 固定用ベルトは掛布団の上から使用してください。利用者の身体の上に直接使用すると、移動時に身体が動きマットレスから落ちる恐れがあります。
- エバキュエーションカバーは緊急避難時に使用するもので、日常的な移動を目的として繰り返し使用することはできません。

ランドルコーポレーション事業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの
営業所・サテライトまでお問い合わせください。

本社	〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-7-1 TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712
施設営業部	〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-7-1 TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712
本社工場	〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430
青森サテライト	〒030-0921 青森県青森市原別8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534
八戸サテライト	〒039-1103 青森県八戸市長苗代1-5-8 TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213
秋田サテライト	〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-81 TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862
岩手営業所	〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631
仙台営業所	〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287
埼玉営業所	〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134
八王子サテライト	〒193-0824 東京都八王子市長房町22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167
東京営業所	〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081
千葉サテライト	〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-9-21 RTサンライト101号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754
横浜営業所	〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-30-6 TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053
名古屋サテライト	〒485-0059 愛知県小牧市小木東1-12 TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830
大阪営業所	〒578-0981 大阪府東大阪市島之内2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
兵庫サテライト	〒651-2132 兵庫県神戸市西区森友1-157 TEL.078-995-5982 FAX.078-995-5984
岡山サテライト	〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066