
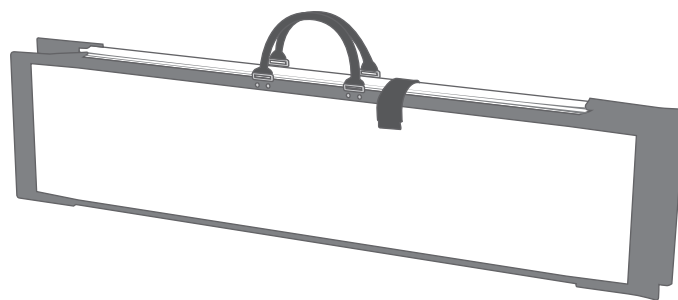


取扱説明書

CA-S075,100,125,150,175,200,225,250
スマートスロープ

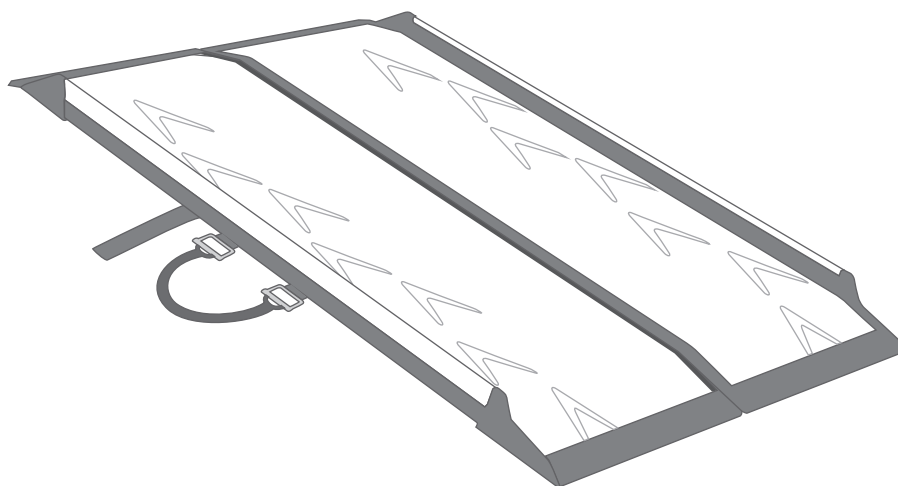

このたびは、「スマートスロープ」をお買い上げ、レンタルしていただき誠にありがとうございます。スマートスロープは車いす専用の段差解消スロープとして使用します。この取扱説明書には、スマートスロープを安全にご使用いただくための注意事項、取扱方法などを記載しております。


ご使用になる前に、必ず本書をお読みの上、正しく理解し安全にご使用ください。

お読みになった後は大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや不都合が生じたときにお役立てください。

株式会社ランダルコーポレーション

| | | |
|---|---------------|-----|
| 1 | 各部の名称 | 1 |
| 2 | 仕様 | 2 |
| 3 | 安全にご使用いただくために | 3～4 |
| 4 | 使用方法 | 5 |
| 5 | 日常のお手入れ | 6 |
| 6 | アフターサービスについて | 6 |

1 各部の名称

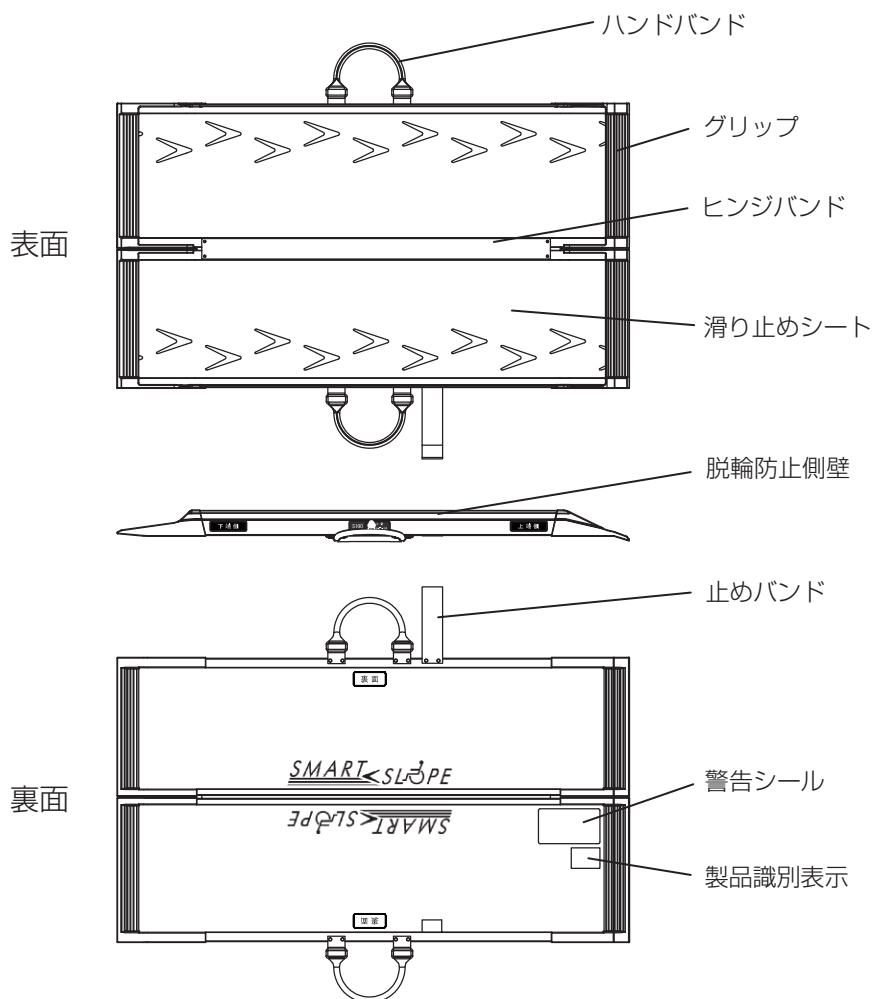

2 仕様

| | |
|-------|--|
| 名 称 | スマートスロープ |
| 材 質 | 中 材：PS（ポリスチレン） 滑り止めシート：軟質PVC（塩化ビニル） 側 壁：アルミニウム 側壁カバー：軟質PVC（塩化ビニル） グ リ ッ プ：軟質PVC（塩化ビニル） |
| 耐 荷 重 | 300kg |

■品番・外寸・重量など

| 品番 | 長さ | 幅（使用時） | 幅（収納時） | 重量 | 側壁高さ |
|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| CA-S075 | 75 cm | 69.5 cm | 35.6 cm | 約 5 kg | 2.5 cm |
| CA-S100 | 100 cm | | | 約 6 kg | |
| CA-S125 | 125 cm | | | 約 8 kg | |
| CA-S150 | 150 cm | | | 約 9 kg | |
| CA-S175 | 175 cm | | | 約 10 kg | |
| CA-S200 | 200 cm | | | 約 11 kg | |
| CA-S225 | 225 cm | | | 約 14 kg | |
| CA-S250 | 250 cm | | | 約 18 kg | |

■適用段差

使用時のスロープの角度が急になると、介助者の負担が大きくなるだけでなく、車いすに乗られている方の安全にも支障が生じます。段差とご使用になる状況に合わせてスマートスロープをお選びください。

| スロープ長 | 自力走行 5° | 非力な介助者 7° | 一般の介助者 10° | 最大段差 15° |
|--------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 75 cm | 5 cm | 7 cm | 11 cm | 18 cm |
| 100 cm | 7 cm | 10 cm | 16 cm | 24 cm |
| 125 cm | 9 cm | 13 cm | 20 cm | 31 cm |
| 150 cm | 11 cm | 17 cm | 24 cm | 37 cm |
| 175 cm | 14 cm | 20 cm | 29 cm | 44 cm |
| 200 cm | 16 cm | 23 cm | 33 cm | 50 cm |
| 225 cm | 18 cm | 26 cm | 37 cm | 56 cm |
| 250 cm | 20 cm | 29 cm | 41 cm | 63 cm |

3 安全に使用いただくために

取扱いを誤ると重大事故につながる恐れがありますので、ご使用前に本書を必ずよくお読みの上、正しくご使用ください。



警告

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



△ 記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指はさみ注意）が描かれています。



⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

【警告ラベル】

- スマートスロープをご使用頂く上で、注意して頂きたい項目をラベルにして貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないで下さい。
- ラベルが剥がれたり、傷ついてしまった場合はお近くの販売店に連絡してください。



警告

■使用用途以外の使い方はしないでください。

- 思わぬけがや、事故の原因になりますので、手動車いす又は電動車いすの移動用以外には使用しないでください。

■ご使用前に各部を点検した後、ご使用ください。

- 思わぬけがや、事故の原因になります。

■最大耐荷重は 300kg です。この荷重を超える使用はしないでください。

- 思わぬけがや、破損の原因になります。

■凹凸が激しい場所や、雪や砂で滑りやすい場所では使用しないでください。

- スロープの設置が不安定となり、けがや事故の原因になります。

■側面に貼ってある「上端側」「下端側」のシールを確認し、上下を間違えずにご使用ください。

- 思わぬけがや、事故の原因になります。



警告

- 上端が4 cm 以上接地面に掛かっており、設置後にすれ、がたつきがないことを確認してからご使用ください。
 - 設置や上端の掛かりが甘いと、使用時にスロープが落下してけがをする原因になります。
- スロープには、ゆっくりとまっすぐ進入し、進入時にスロープにすれがないことを確認してください。
 - 進入の仕方が悪いと、スロープがずれて設置が不安定となり、思わぬけがの原因になります。
- スロープ上での急停止・方向転換はしないでください。
 - 思わぬ事故や、けがの原因になります。
- 下る時は必ず介護者が付き、後輪から進入してください。自走の場合も同様に後輪から進入してください。
 - 思わぬけがや、事故の原因になります。
- お客さまによる修理・改造はしないでください。
 - 思わぬけがや、破損の原因になります。

分解禁止




注意

- 走行面に砂や雪等の付着がある場合は、清掃の上使用してください。
 - 滑ってけがをする原因となります。
- スロープの設置や折りたたみの際は、ハンドバンドを使用してください。
 - 指などを挟み、けがの原因になります。
- 表面には滑り止め加工を施しています。裏表を確認の上、広げてご使用ください。
 - 破損・変形の原因になります。
- 屋外に長時間置かないでください。
 - 砂が付着したり、太陽光により高温になり、劣化が早まる恐れがあります。
- 設置部の摩耗、滑り止めの摩耗などの異常があるときは、ただちに使用を中止し弊社もしくは販売店にご連絡ください。
 - 思わぬけがの原因になります。
- 介護者は滑りやすい靴や、靴底に突起がある靴（ピンヒール等）の使用を避けてください。
 - 思わぬけがや、製品の破損の原因となります。
- 高温（60℃以上）になる場所での保管・使用・洗浄は避けてください。
 - ゴム・樹脂部品の劣化・変形の原因になります。
- 車いすのハンドリムが側壁に当たる場合は、ハンドリムと側壁の接触に注意してください。
 - 思わぬけがの原因になります。

4 使用方法

1. 設置方法

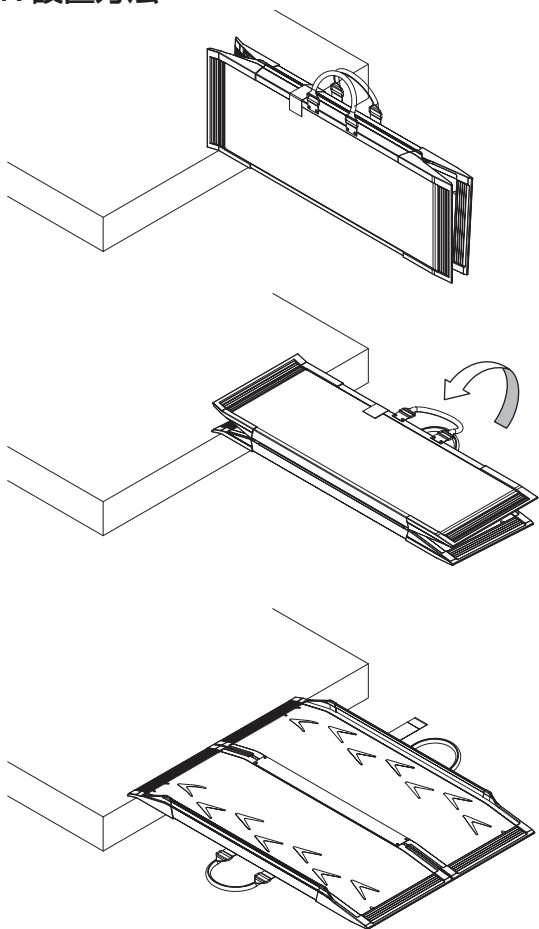

①「上端側」と書かれた部分を段差にかけてください。

②ハンドバンドを持ち、周りや自分にぶつけないよう注意しながら広げてください。

③走行面の矢印が上り方向を向いており、ズレやがたつきがないことを確認してから使用してください。



設置や折りたたみの際、指などを挟まないようご注意ください。

2. 走行方法



スロープを使用する際は、必ず介助者が付きゆっくりまっすぐに渡ってください。
また、介助者は車いすをpushする方向で前向きに上がってください。降りる時は逆に、後ろ向きで受け止めるようにして降りてください。
自走の場合も、降りるときはバックでお降りてください。

5 日常のお手入れ

1. 保管方法

直射日光と雨を避け、高温（60℃以上）や多湿にならない場所で保管してください。

2. 清掃方法

清掃は毛先の柔らかいブラシにて水洗いしてください。汚れがひどい場合は水で薄めた家庭用中性洗剤を使用してください。この時、強アルカリ性、強酸などが含まれている洗剤は使用しないでください。乾燥は風通しの良い場所で自然乾燥するようにしてください。



警告

■定期点検

- 使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部の破損・脱落・可動部の動作などを点検してください。点検の結果、異常がある場合は、修理などのアフターサービスをご利用ください。



注意

■お手入れ

- スチームによる洗浄はしないでください。
- オゾンまたは高温（60℃以上）での消毒はしないでください。
- シナー・ベンジンなどの揮発性の高い薬品は絶対に使用しないでください。

■長期保存

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所は避けてください。温度－10℃～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

6 アフターサービスについて

保 証 書

| | | | |
|--|---------------------|------|--------------------|
| 品名／品番 スマートスロープ／CA-S075, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | | 保証期間 | ★お買い上げ日 年 月 日より3年間 |
| お客様 | お名前 〒 () ご住所 | ★販売店 | () |

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より3年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■ 修理を依頼される時

◎ 連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号
- お買い上げ日
- 故障、または異常の内容（できるだけ詳しく）

◎ 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無料で修理いたします。

ただし、保証期間内でも修理が有償となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 製品の最低保有年数は

弊社では、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有年数を製造打ち切り後、7年としております。

ランドルコーポレーション事業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの
営業所・サテライトまでお問い合わせください。

| | |
|----------|---|
| 本社 | 〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1 TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712 |
| 施設営業部 | 〒 351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1 TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712 |
| 本社工場 | 〒 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430 |
| 青森サテライト | 〒 030-0921 青森県青森市原別 8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534 |
| 八戸サテライト | 〒 039-1164 青森県八戸市下長 8-10-8 TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213 |
| 秋田サテライト | 〒 010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反 170-81 TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862 |
| 岩手営業所 | 〒 020-0846 岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631 |
| 仙台営業所 | 〒 984-0821 宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287 |
| 埼玉営業所 | 〒 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134 |
| 八王子サテライト | 〒 193-0824 東京都八王子市長房町 22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167 |
| 東京営業所 | 〒 120-0005 東京都足立区綾瀬 1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081 |
| 千葉サテライト | 〒 262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2-9-21 RT サンライト 101 号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754 |
| 横浜サテライト | 〒 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-30-6 TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053 |
| 名古屋サテライト | 〒 485-0059 愛知県小牧市小木東 1-12 TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830 |
| 大阪営業所 | 〒 578-0981 大阪府東大阪市島之内 2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700 |
| 兵庫サテライト | 〒 651-2132 兵庫県神戸市西区森友 1-157 TEL.078-995-5982 FAX.078-995-5984 |
| 岡山サテライト | 〒 700-0975 岡山県岡山市北区今 8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066 |