


【ゆれないリフターII】

この度は、ランダルコーポレーションの製品をお買いあげ、またはレンタル頂き、まことにありがとうございます。この「取扱説明書」には、「ゆれないリフターII」を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みになり正しくお使いください。また分解・組み立て手順も記載されております。安全にご使用いただくため、手順をよくご理解頂き、指示に従い正しく作業を行ってください。この「取扱説明書」は、いつでもごらんいただけるように大切に保管してください。

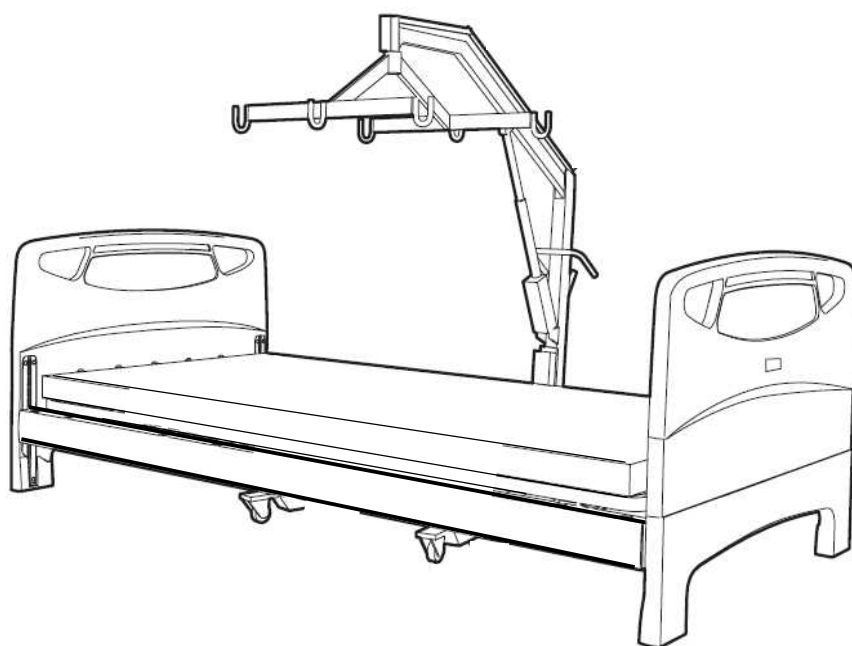

目次

■安全上のご注意	1
■特長	1
■各部の名称と組立	2
■配線の仕方	3
■スリングシートの使い方	4～5
■車イスへの移動	6
■寝ている状態からのセットの仕方	6
■バッテリーの知識	7
■仕様・故障かな？と思ったら	8

仕様について

■電装品

品目	型式	入力電流	出力電源	重量	防水性	コード長さ	備考
モーター	LA32	24V	—	3.5kg	IP66	—	6000N/最大電流値6A
手元スイッチ	HB41	24V	—	0.2kg	IP65	3m	—
コントロールボックス	CB12	100V	DC24V	3.5kg	IP66	3m	バッテリー内蔵型
バッテリー	密封式鉛蓄電池			12V1.2Ah	…2個/台		

■本体

型番	A-7536
サイズ	全長1150mm×幅730mm×高さ1370mm
上下ストローク	ハンガー高さ 660～1660mm
材質	スチール製:抗菌粉体塗装
重量	45kg
耐荷重	100kg

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に以下の項目をチェックしてください。それでも改善されないときは、ベッドの使用をやめて販売店に修理を依頼してください。

チェック1

電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？

対応：電源プラグをコンセントに差し込んでください。

チェック2

手元スイッチのコネクタがコントロールボックスから外れていませんか？

対応：手元スイッチのコネクタをコントロールボックスに差し込んでください。

チェック3

アクチュエータ（モーター）のケーブルがコントロールボックスから外れていませんか？

対応：アクチュエータ（モーター）のケーブルをコントロールボックスに差し込んでください。

青森サテライト	〒030-0921 青森県青森市原別 8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534	八王子サテライト	〒193-0824 東京都八王子市長房町 22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167	名古屋サテライト	〒485-0059 愛知県小牧市小木東 1-12 TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830
岩手営業所	〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北 1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631	東京営業所	〒120-0005 東京都足立区綾瀬 1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081	大阪営業所	〒578-0981 大阪府東大阪市島之内 2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
仙台営業所	〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉 3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287	千葉サテライト	〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園 2-9-21 RT サンライト 101 号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754	神戸サテライト	〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通 4-1-2 TEL.078-579-6525 FAX.078-579-6526
埼玉北サテライト	〒347-0002 埼玉県加須市外野 432 TEL.0480-69-2171 FAX.0480-69-2172	横浜サテライト	〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-30-6 TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053	岡山サテライト	〒700-0975 岡山県岡山市今 8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066
所沢営業所	〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井 421 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134				

販売店

株式会社ランダルコーポレーション本社


〒351-0034 埼玉県朝霞市西原 1-7-1

代 表：TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3709

営業部ダイヤルイン：TEL.048-475-3662 FAX.048-475-3712

付属品について


弊社ベッドをご利用のお客様で、下図ベッド脚をご使用になっている方は、お手数ですが付属品のベッド脚を取付けてご利用ください。

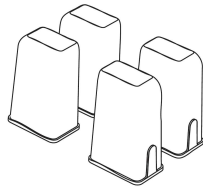


脚座



脚座

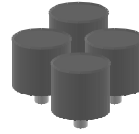

低床用脚座

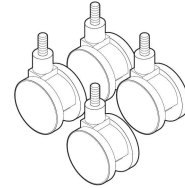


Φ75キャスター


※ハイローベッドシリーズのみ

■ 内容物

ベッドを組み立てる前に以下の部品がすべてそろっていることを確認してください。

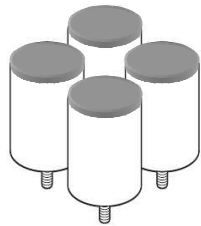

脚座×4

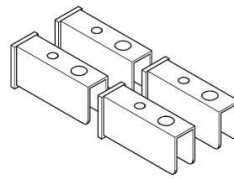



ねじアダプタ×4

1 脚座の取付け方





組み立て時の注意および本書のみかたについては「ベッド取扱説明書」をご覧ください。



- ① 4つのネジアダプタをハイローユニットに4カ所差し込みます。

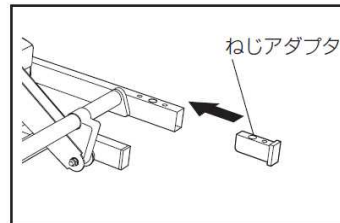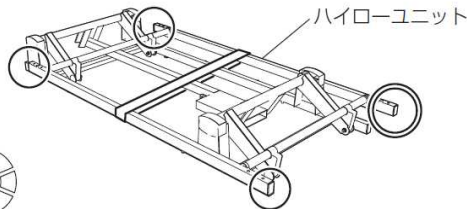

- ② 4つの低床用脚座をさかさまのままの状態にハイローユニット4カ所に取り付けます。

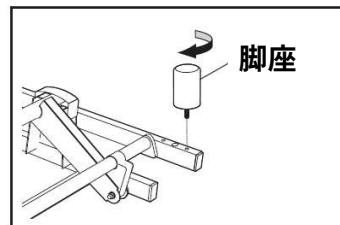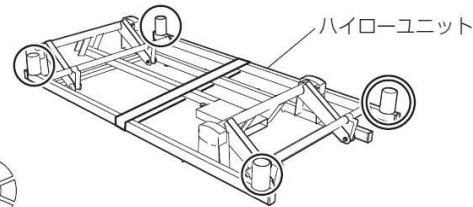

※ハイロー2・3・4モータータイプ

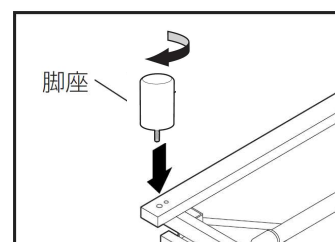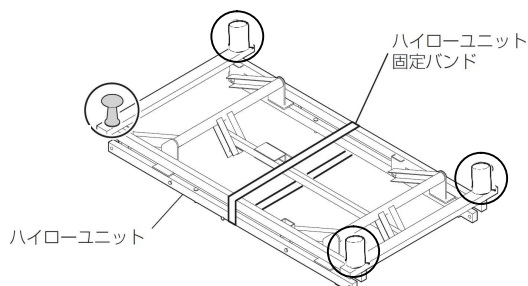

※ハイロー1モータータイプ